



Moocall
SENZOR TELENÍ

Uživatelská příručka



Děkujeme vám, že jste si vybrali Moocall

My ve společnosti Moocall jsme hrdí na náš projekt a doufáme, že budete tak spokojeni se svým senzorem telení Moocall jako my.

Těšíme se s vámi na mnoho bezpečných a úspěšných porodů!

S pozdravem, tým Moocall



Like us on
Facebook

www.facebook.com/moocall

Moocall je na Facebooku. Dejte like, prosím na naši stránku a budete od nás dostávat nejnovější aktualizace přímo ve svém newsfeedu.

Krok 1: Aktivujte si senzor telení Moocall

Před použitím si musíte svůj nový senzor Moocall aktivovat on-line.

Aktivaci proveďte na www.moocall.com/register

Pokud nemáte přístup na Internet, pro aktivaci svého senzoru nám zavolejte.

Pokud nebyl senzor aktivován, po zapnutí se sám okamžitě vypne.



Device Registration

Step 1 Validate Step 2 Identify Step 3 Register

Let's start by adding your device and email details

• Email

• MC Code

• IMEI


Phones for Device Alerts

Any alert regarding the device will be sent to these numbers.

• Primary

• Alternate

Krok 2: Upravení gumové podložky

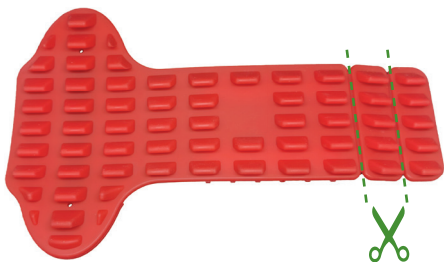

Gumová podložka se může uříznout podle průměru ocasu krav ve vašem stáde. Pro tlusté ocasy odřízněte oba segmenty, pro středně velké ocasy uřízněte jeden a pro slabé ocasy neuřízněte žádný segment.

Pokud má vaše stádo různou tloušťku ocasů, kontaktujte Moocall k nákupu dalších gum.

Krok 3: Nabítí

K nabití senzoru telení Moocall uvolníte gumovou podložku, čímž odkryjete zástrčku krytu nabíječky. Sundejte kryt nabíječky a vložte kabel nabíječky tak, jak je zobrazeno.

Jakmile je nabíjení dokončeno, dejte zpět kryt nabíječky a nasad'te podložku zpět kolem krytu nabíječky.



DŮLEŽITÉ: Před tím, než kryt nabíjení vrátíte zpět na senzor, se ujistěte, že je suchý, aby voděodolné těsnění správně fungovalo.


NEVTLAČUJTE NÁSILÍM USB kabel do nabíjecího portu senzoru.

DŮLEŽITÉ: První nabití by se mělo provést přes noc.

Krok 4: Zapnutí senzoru

Senzor zapnete stisknutím tlačítka a jeho přidržení po dobu čtyř vteřin.

Světlo na senzoru bude blikat modře každých 4-5 vteřin, což bude znamenat, že senzor je zapnutý a aktivní.

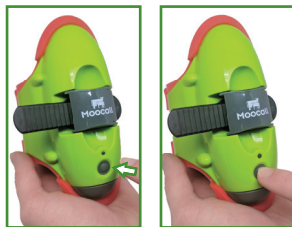

Po vypnutí senzor zase zapněte nejdříve až za pět minut.
Pro vypnutí podržte tlačítko po dobu deseti vteřin.

Světelný indikátor:



Senzor je zapnutý a připravený



Baterie zcela nabitá



Probíhá testování



Slabá baterie



Probíhá telení



Aktualizace softwaru



Připojování senzoru

Senzor vám pošle zprávu, pokud úroveň baterie klesne pod 15 %

Krok 5: Testování senzoru

Proveďte, prosím, tento test v místě, kde se bude senzor používat, abyste zajistili pokrytí sítě adekvátní pro fungování senzoru.

Pokud nedostanete zprávu během deseti minut od provedení tohoto testu, kontaktujte zákaznickou podporu Moocall.



Ujistěte se, že senzor je zapnutý a modré světlo bliká.



Velmi krátce pevně stiskněte tlačítko.



Uvolněte tlačítko a znovu ho ihned stiskněte.



Senzor by měl začít blikat zeleně, což znamená, že test probíhá.

Pokud zelené světlo nezačne po druhém stisknutí blikat, ujistěte se, že máte s tlačítkem pevný kontakt, a zkuste to znovu.

Na všechna čísla napojená na senzor obdržíte SMS nebo dostanete e-mail a oznámení přes aplikaci Moocall, pokud jste si ji nainstalovali.

Tlačítko stiskněte jen prstem. Nepoužívejte žádné nástroje, protože ty by mohly poškodit tlačítko a elektroniku uvnitř.

Krok 6: Otevření spony

Zvedněte záklopu, čímž se dvířka Moocall otevrou. Zatlačte záklopu doleva až na doraz, dokud se kliknutím neotevře a neuvolní tak pásek.



Krok 7: Umístění senzoru na ocas

Umístěte senzor na ocas krávy, která bude brzy rodit. Senzor by se měl umístit na ocase naproti vulvy.



Vsuňte ozubený pásek do západky.



Zavřete západku a dvířka přes ni zaklapněte na místo. Zatáhněte za volný konec ozubeného pásku, dokud senzor není pevně usazen na ocasu krávy.



Zajistěte, aby byl senzor pevně usazen na ocase tím, že vyzkoušíte, jak je připevněn. Senzor by měl být schopen pohybovat se ze strany na stranu, ale ne směrem dolů po ocase. Upravujte pevnost pásku tak, jak je potřeba, dokud nebude dosaženo správného nasazení.



Video demonstrace je k dispozici na:
www.moocall.com/user-guide

DŮLEŽITÉ! NEUTAHUJTE PŘÍLIŠ!

Pokud je senzor nasazen na ocase příliš těsně, dostáváme nesprávná varování a můžete způsobit krávě trvalé a nevratné poškození!

POZNÁMKA: Ujistěte se, prosím, že vaše gumová podložka byla upravena na správnou velikost ocasu krávy. Použití gumy špatné velikosti může vést k nepohodlí zvířete a nesprávným varováním ze senzoru.


Krok 8: Kontrola připevnění na ohon

Jakmile je senzor telení Moocall umístěn na ocase, ujistěte se, prosím, že gumová podložka nevyklouzává z gumy ozubeného pásku na ocase nebo že guma není shrnutá či se nepřekrývá s umělohmotným obalem a nedochází tak k jejímu přiskřípnutí.




SMS upozornění Moocall


Toto jsou SMS upozornění, které vám senzor telení Moocall pošle na váš telefon.

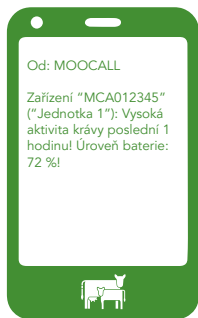


První varování

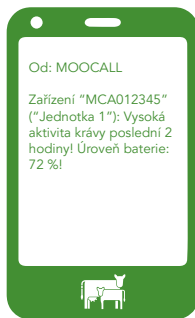


Druhé varování

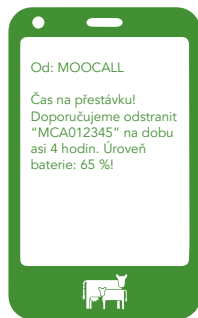


Varování týkající se přestávky

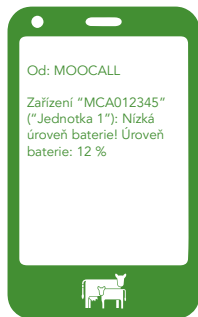

Varování týkající se baterie

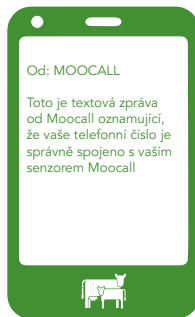


Zpráva o testování

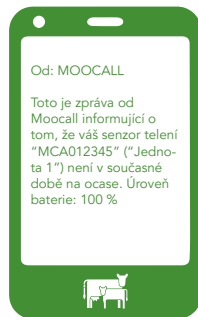

Zpráva o tom, že senzor spadl z ocase

Ovládací panel MyMoocall

Po registraci senzoru Moocall si vyberete uživatelské jméno a heslo pro ovládací panel MyMoocall. Zde vidíte stav všech svých senzorů v levém okně a všechna upozornění z nich odeslaná v prostředním okně. Můžete spravovat svá telefonní čísla v pravém okně a svá upozornění e-mailem, nastavení časové zóny a jazyka v rozbalovacím menu ze svého uživatelského jména vpravo nahoře.

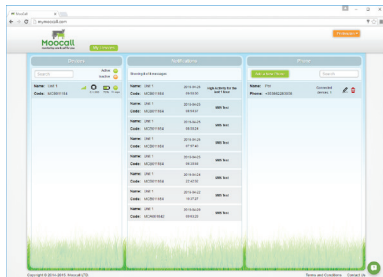

Přístup do ovládacího panelu MyMoocall přes www.mymoocall.com



Aplikace Moocall Breedmanager je k dispozici pro zařízení Android a iOS. Hledejte "Moocall" ve své prodejně aplikací a nainstalujte si ho. Přihlaste se do aplikace pomocí stejného uživatelského jména a hesla, které používáte k přístupu do svého ovládacího panelu MyMoocall.

Aplikace vám poskytuje přístup ke stejným funkcím, ke kterým máte přístup pomocí ovládacího panelu MyMoocall, a mnohem více: nástroj na řízení stáda, oznámení pomocí vyzváněcího tónu, kdy kromě přijetí textové zprávy také zazvoní váš telefon, fóra s otázkami a odpověďmi, a ještě více. A vše se provádí přes WiFi, pokud je mobilní signál ve vašem okolí slabý či žádný, čímž se zajistí, že oznámení nikdy nezmeškáte.

Krok 9: Odstranit

Odstraňte senzor, pokud je to bezpečné. Zvedněte záklopku pro otevření dvířek Moocall a přitiskněte záklopku na západku doleva až na doraz, čímž uvolníte pásek.



Krok 10: Vyčistěte senzor

Čistěte jemně suchým kartáčkem nebo vlhkým hadříkem. Vždy senzor vyčistěte po každém porodu.



POZNÁMKA: NEPONOŘUJTE senzor do vody ani jiných tekutin!

VAROVÁNÍ! SENZOR ČISTĚTE POUZE S NASAZENÝM KRYTEM NABÍJEČKY

Krok 11: Resetování senzoru

Po narození telete stiskněte tlačítko na jednu vteřinu, čímž přístroj resetujete. Světlo se změní z tmavě červené na blikající modrou barvu a senzor je nyní připraven přejít na další krávu. Senzor se automaticky zresetuje po jedné hodině, pokud se nebude resetovat ručně. Senzor vypnete stisknutím a přidržení tlačítka zapnutí po dobu deseti vteřin.



Další informace o senzoru

DŮLEŽITÉ!

Senzor Moocall je navržen tak, aby nabízel farmářům cennou pomoc během sezóny telení. Není zaručeno, že bude předvídat každé jednotlivé telení!

Během období telení by se měli být krávy pod přímým či kamerovým dohledem.

Doporučuje se, aby farmáři využívali vlastní zkušenosti a znalosti svého stáda k zajištění nejlepšího výkonu. Pokud je například senzor připevněn ke staré krávě nebo pokud kráva nemá před porodem normální těžkosti či porodní bolesti, senzor nemusí poslat upozornění ve formě textové zprávy na farmářův mobilní telefon.

Utáhněte, prosím, senzor pouze do takové míry, aby to bylo bezpečné a aby nespadl z ocasu; pokud je senzor příliš utažený, může začít zvířeti vadit, a to může vést k falešným textovým upozorněním.

Pokud kráva neporodí během čtyř dnů od připevnění senzoru k ohonu, odstraňte, prosím, přístroj z ocasu na dobu 3-4 hodin a pak ho znovu připevněte, abyste zabránili nepohodlí zvířete.

Senzory Moocall jsou schopné včas zjistit porodní bolesti, které ještě nemusí být pro farmáře patrné. Po obdržení textové zprávy, prosím, krávu pravidelně kontrolujte a dohlížejte na ni.

Chování se u každé krávy velmi liší. Očekává se, že senzory Moocall budou předpovídat velmi vysoké procento telení (zhruba 95 %). Společnost Moocall Ltd nepřebírá odpovědnost za zvířata, která uhynula v důsledku toho, že byl doručen krátký či žádný text oznámení.

Senzor telení Moocall je určen pouze pro skot. Senzor, prosím, nepoužívejte u jiných zvířat.

Viz www.moocall.com/user-guide - videa a informace

Údržba baterie

Pro zachování životnosti baterie a dlouhověkosti senzoru nikdy nenechávejte baterii zcela vybit. Jakmile skončí telení v sezóně, zcela baterii nabijte před tím, než senzor odložíte.

Pokud to neuděláte, hrozí poškození baterie a to, že baterie se už nebude moci dále nabíjet.

POZNÁMKA: PŘED ULOŽENÍM SENZORU BATERII ZCELA NABIJTE!

Součásti senzoru

Nabíječka



Zásuvka AU/NZ



Zásuvka NA



Zásuvka EU



Kabel nabíječky



Krytka nabíječky



Pásek



Šroub a matice



Nastavitelná západka



Gumová vložka



Krytka západky



Senzory telení MyMoocall

Zapište si čísla senzorů Moocall MC- a IMEI zde:

MC-číslo:

IMEI-číslo:

Přihlášení do MyMoocall

Zapište si přihlašovací údaje do MyMoocall zde:

Uživatelské jméno:

Heslo:

www.mymoocall.com

POZNÁMKY:

Kontaktujte Moocall

Naši pracovníci zákaznického servisu vždy rádi zodpoví všechny vaše otázky o Moocall.

Lze nás kontaktovat mnoha způsoby:

Telefon:



01 969 6038



0203 627 1126



1-800-657-4291

International: +353 1 969 6038

E-mail:

help@moocall.com

Web:

www.moocall.com

Facebook:

www.facebook.com/moocall

Twitter:

www.twitter.com/moocallsensors

Chat je k dispozici na www.moocall.com, www.mymoocall.com a na našem facebooku na adrese www.facebook.com/moocall

Pošta:

Moocall Ltd.

Carraig House

Brookfield Terrace

Blackrock

Co. Dublin

Republic of Ireland



Moocall

spojuje vás s vašimi zvířaty



Moocall je registrovaná ochranná známka

You acknowledge and agree that the purchase of and/or use of the Moocall calving sensor (the "device") is governed by Moocall Limited's standard terms and conditions of supply which can be found at <http://moocall.com/terms> (the T&Cs). The purchase of and/or use of the device by you shall constitute express acceptance by you of the T&Cs and an acknowledgement that you have read and understood the T&Cs.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
FCC ID: RI7GE865

Řešení problémů:

Tel:



01 969 6038



0203 627 1126



1-800-657-4291

International: +353 1 969 6038

Email: help@moocall.com

