

Osvedčená kvalita

**... nová technológia
a dizajn**



**HK prístroj pre diagnostiku
gravidity kráv**

Reintech

Spoločné zistenie tehotenstva

Viac pokoja vďaka okamžitej diagnostike. Rýchla, jednoduchá a spoľahlivá diagnostika tehotenstva z 90. dňa pomocou ultrazvuku znamená, že sa vyhnete nepríjemným prekvapeniam, ako je falošné tehotenstvo alebo odmietnutie plodu. Nie sú potrebné žiadne predchádzajúce skúsenosti ani rozsiahle školenie a absolvovanie testu trvá zvyčajne menej ako 30 sekúnd.

Problém

Krava bola zakrytá a doposiaľ nejavila známky návratu k estru. Napriek tomu je riziko potratu vysoké až do dvanásteho týždňa tehotenstva, pretože plod ešte musí byť implantovaný do matky.

Riešenie

Diagnostická jednotka gravidity HK vám dá pokoj. Sondu jednoducho namažete kontaktným olejom, umiestnite na brušnú stenu blízko dna vemena a presuňte ju cez brušnú dutinu. Ak je krava gravidná, bude sa to zobrazovať nepretržitým signálom.

Výhody

Môžete sa rozhodnúť, kedy sa má test vykonať, a nie sú potrebné predchádzajúce skúsenosti alebo rozsiahle školenia. Test eliminuje potrebu transrektálneho vyšetrenia, ktoré je pre kravu nepríjemné a je tiež bez rizika. Ak je výsledok nejasný, jednoducho postup opakujte neskôr, bez ďalších nákladov. Jednotka, ktorá sa dodáva v odolnom plastovom puzdre, sa pripevní jednoducho na opasok a ponechá obe ruky voľné na držanie sondy.



Ako spoľahlivo a presne merať

Východiskový bod sondy je pod zátylkom v spodnej časti vemena. Ak je kobyla gravidná, ultrazvukové vlny sa odrazia od placéntarnej tekutiny a budú vydávať nepretržitý tón.

Spoločnosť

Od 90. dňa je spoločnosť diagnostiky veľmi vysoká, presahuje 90%. Ak je sonda umiestnená príliš ďaleko k chvostu, odrazy od močového mechúra alebo od dna panvy môžu viesť k falošne pozitívnym diagnózam. Ak je výsledok negatívny, mal by sa opakovať po dvoch až troch dňoch. Takto získate ďalší pokoj v duši.

Vyžiadajte si náš hlavný katalóg spoločnosti Rheintechnik



Výrobca:

Rheintechnik

Weiland und Kaspar GmbH & Co. KG

Fon +49(0)26 22 98 86-0 · Fax +49(0)26 22 98 86 29 Internet:

www.rheintechnik.de · E-mail: hk@rheintechnik.de

Predaj:

VETIS Centrálny sklad a sídlo firmy

930 03 Královičové Kračany 91

Tel.: 031/ 55 14 112

Mob: 0918/ 514 112 E-mail: vetis@vetis.sk