

**TECHNOBASE - Univerzálna umelá hmota
pre veterinárnu medicínu
TECHNOBASE 8000 - Komplet set**



Kat. č.: 16251 set pre 14 použití
16259 set pre 4 použitia
16257 kvapalná zložka, 500 ml
16258 prášok 1000 g
16231 drevená špachtľa
16104 drevený klátik, jednotlivý
16263 pohárik pre namiešanie
s 25 ml stupnicou
16264 Dávkovacia nádoba na tekutinu

• Rýchle spracovanie :

Hmotu je ihneď možné modelovať ručne. To veľmi uľahčuje prácu. Technobase 8000 sa vytvrdzuje pri 20°C za menej ako 4 minúty!



• Drží veľmi pevne:

Technobase má vynikajúce lepidivé vlastnosti ! Môžete si byť istí, že chorý paznecht bude až do doby, než sa ošúcha drevený klátik , optimálne odľahčený.



•Modelovať bez lepenia:

vo fáze modelovacej hmoty je ju možné perfektne vymodelovať bez toho, aby sa Vám prilepila na ruky. Až do polymerizácie je hmota ohybná a spracovateľná.

**• Minimálne exotermné zaťaženie:**

V dôsledku chemickej reakcie pri zmiešaní tekutej zložky s práškom dochádza k veľkej tvorbe tepla. Tieto vysoké teploty poškodzujú tkanivá a spôsobujú zvieratú bolesť. Prípravok Technobase bol v tomto ohľade vylepšený ! Pokojne môžete prevádzkať extrakutánne dlahovanie bez poškodenia tkaniva.

**Moderný systém ošetrovania**

paznechtov: Technobase je moderný systém ošetrovania paznechtov pre znehybnenie poranených, alebo chorých paznechtov ! Okrem toho môžu byť realizované ďalšie možnosti použitia v oblasti veterinárnej medicíny.

Príprava:

- Povrch musí byť zdrsnený (napr. rašpl'ou)
- Má byť bezprašný, bez mastnoty, úplne suchý (odporúča sa použitie alkoholu na očistenie povrchu)
- Pre dosiahnutie najlepšieho výsledku má byť miešacia nádoba a materiál v nej schladený (v lete) alebo zahriaty (v zime) na 20-23 °C

Miešací pomer:

- Prášok 70g : tekutina 25ml (3:1)
- Na dávkovanie sa majú používať nádoby priložené v krabici
- Treba dostatočne premiešať
- Ak sa mix materiálov pripraví v inom pomere než odporúčaný, treba si dávať pozor na to, aby sa nepridávalo príliš veľa prášku, lebo zmiešaný materiál bude príliš suchý

Aplikácia:

- Natrieť v tenkej vrstve na kopyto a tiež na drevený klátik
- Potrvá 4-6 minút, kým stuhne