

M1-fixačná klieťka univerzálna

PRACOVNÝ POSTUP K FIXAČNEJ KLIETKE

Po umiestnení klieťky naženieme zvieratá jednotlivovo do klieťky a zatvoríme zadnú bránu.

Bočné brány sú zatvorené. Predné brány sú mierne pootvorené, aby zviera videlo na prechod klieťkou a zároveň nemohlo cez klieťku prebehnúť. V prípade, že sa zviera nedá zahnať do klieťky, používame laná a navijacie zariadenia.

Zásadne udržiavame v stajni ticho a klud, aby sme zvieratá čo najmenej stresovali. V závislosti od typu ustajnenia uvoľňujeme zviera smerom dopredu, do strany alebo dozadu.

Spútané zviera je zaistené jedným popruhom v dolnej časti hrudníka a dvoma reťazami v zadnej časti klieťky, ktoré sú zachytené na hornom ráme klieťky a prechádzajú medzi panvovými končatinami a vemenom.

Pásový systém slúži ako podporný systém, nesmie sa používať na zdvih celého zvieratá. Po upevnení zvieratá zatvoríme zadnú bránu a zaistíme ju reťazou. Zadnú končatinu upevníme pomocou samostatného zdvíhacieho zariadenia. Dve samostatné predné navijacie zariadenia sa používajú na upevnenie hrudných končatín v otočnej opierke vybavenej hákom.

Lano sa upne pomocou háčika do svorky hrudnej končatiny, lano sa prevlečie cez háčik otočnej podpory a pomocou ovládacieho kolieska sa hrudná končatina natiahne na podperu a zaistí sa reťazovým úchytom.

Po ukončení ošetrenia končatiny ju uvoľníme opačným spôsobom.

Panvová končatina sa zdvíha aj jednotlivovo pomocou samostatného navijacieho zariadenia a lana s hákom, ktoré prechádza slučkou v sklopnom ráme zadnej brány.

Umiestnime lano s hákom ľubovoľne nad paznechtami končatiny a pomocou ovládacieho kolieska zdvihnite nohu do maximálneho uhla 90° k nohám klieťky.

Po ošetrení paznechtu zviera uvoľníme opačným spôsobom.

Ďalšie možné použitie klieťky:

1. ošetrenie mliečnej žľazy - pre bezpečnosť pracovníka, ktorý vykonáva ošetrenie mliečnej žľazy, používame samostatné predné zariadenia na pridržanie hrudných končatín smerom k hlave zvieratá
2. keď je materský inštinkt narušený - keď sa teľa kŕmi a krava sa mu snaží ublížiť, používame rovnaký dôvod
3. využitie pri fixácii hlavy
 - odrokovanie
 - značenie zvierat
 - nasadenie mulcových zábran a krúžkov
 - aplikácia liekov perorálnou cestou
 - insemináčny zásahy a liečba porúch plodnosti
 - menšie veterinárne zákroky s použitím fixácie zvierat
 - pri ďalšej úprave klieťky zviera sa môže zviazať