

Aesculap

B. Braun VetCare



Preklad pôvodných pokynov

Akkurata/Vega

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Ďakujem

za výber nového zastrihávača vlasov Akkurata/Vega od spoločnosti Aesculap.

Je stelesnením najnovšej technológie. Tento profesionálny zastrihávač vlasov je inovatívny a dizajnový. Pri vývoji zastrihávača vlasov sa zohľadňovali požiadavky na profesionálny zastrihávač používaný v kaderníckom salóne.


Okrem optimálneho rezného výkonu poskytuje trimmer aj tieto výhody:

- Bezdrôtová alebo sieťová prevádzka
- Rýchle nabíjanie za menej ako jednu hodinu
- 3-stupňové nastavenie dĺžky rezu
- Indikátor nabitia batérie

Dúfame, že sa vám práca s vyžínačom bude páčiť.

S pozdravom

Aesculap Suhl GmbH

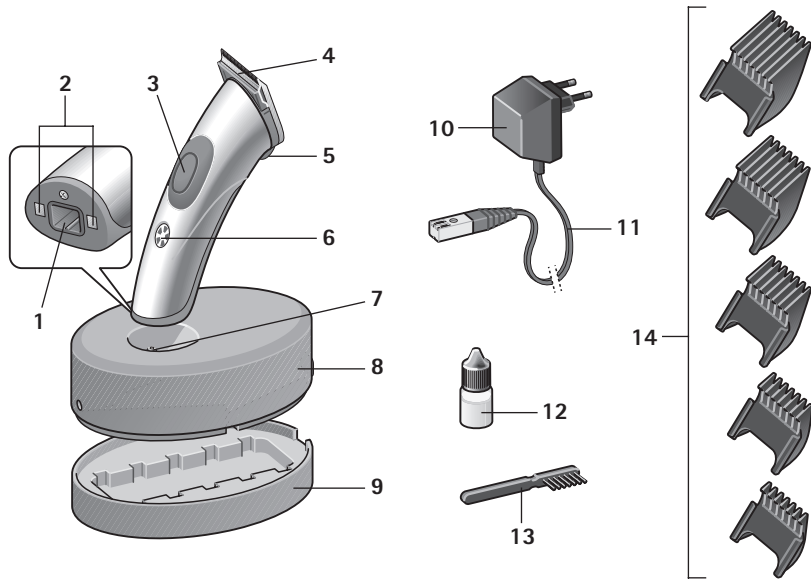

1. Názvy dielov

- 1 Zásuvka napájacieho kábla na zastrihávači (pre sieťovú prevádzku)
- 2 Nabíjacie kontakty na zastrihávači
- 3 Spínač zapnutia/vypnutia
- 4 Sada nožov
- 5 Páka na nastavenie dĺžky rezu
- 6 Indikátor nabíjania / indikátor nabitia batérie
- 7 Nabíjacie kontakty na nabíjacej jednotke
- 8 Nabíjačka
- 9 Držiak na upevnenie hrebeňa
- 10 Sieťový adaptér
- 11 Napájací kábel pre nabíjaciu jednotku a sieťovú prevádzku
- 12 Fľaša na olej
- 13 Čistiaca kefka
- 14 Hrebeňové nástavce 4, 8, 12, 16, 20 mm

2. Bezpečnosť

Pred použitím zastrihávača si pozorne prečítajte návod na použitie, najmä kapitolu "Bezpečnosť". Ochráňte sa tak pred možným nebezpečenstvom a spotrebič pred poškodením v dôsledku nesprávnej obsluhy.

Tento návod si uschovajte na bezpečnom mieste, aby ste sa s ním mohli v budúcnosti oboznámiť. Ak spotrebič odovzdáte niekomu inému, nezabudnite mu odovzdať aj tento návod.

2.1 Vysvetlenie upozornení

V týchto pokynoch nájdete nasledujúce upozornenia:



NEBEZPEČENSTVO

Vysoké riziko. Nedodržanie tohto upozornenia môže spôsobiť vážne zranenie.



POZOR

Stredné riziko. Nedodržanie výstrahy môže spôsobiť škody na majetku.

POZNÁMKA

Nízke riziko. Body, ktoré by ste mali dodržiavať pri používaní alebo manipulácii so spotrebičom.

2.2 Predpokladané použitie

- Zastrihávač sa musí používať len na strihanie srsti malých zvierat.
- Spotrebič je určený len na použitie v interiéri. Nepoužívajte ho vo vonkajšom prostredí (záhrada, terasa atď.).
- Spotrebič bol vyvinutý na profesionálne použitie v kaderníckych salónoch a veterinárnej praxi. Za predpokladu dodržania bezpečnostných informácií ho možno používať aj v domácnosti.

2.3 Dôležité informácie o nebezpečenstvách

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!



NEBEZPEČENSTVO:



- Spotrebič sa nesmie používať ani nabíjať vo vani alebo v sprche, ani nad plným umývadlom alebo inou nádobou s vodou.
- Spotrebič, nabíjaciu jednotku a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu vlhkosti, vody a iných kvapalín a nepoužívajte ich s mokrými rukami.

- Neponárajte spotrebič, nabíjaciu jednotku ani napájací kábel do vody ani ich neoplachujte pod tečúcou vodou.
- Ak spotrebič spadol do vody, nesmie sa potom používať.
- Dodatočnú ochranu poskytuje inštalácia prúdového chrániča s menovitým vypínacím prúdom menším ako 30 mA v domácom elektrickom systéme. Odporúčame vám, aby vám elektrikár nainštaloval prúdový chránič na ochranu obvodov.



POZOR

Holiaca hlava môže byť po dlhšom používaní horúca!

POZNÁMKA

Zariadenie Clipper sa môže prevádzkovať len s napájacím zdrojom podľa údajov uvedených na typovom štítku.

14.1 Všeobecné bezpečnostné informácie



Nebezpečenstvo

- Spotrebič nikdy nepoužívajte, ak:
 - zastrihávač, nabíjacia jednotka alebo napájací kábel sú poškodené.
 - sada nožov je poškodená alebo sa láme, pretože by to mohlo spôsobiť poranenie pokožky.
 - spotrebič spadol alebo bol upustený, vykazuje známky poškodenia alebo nefunguje správne.
 - spotrebič je natolko poškodený, že sú odhalené elektrické časti.

Vo všetkých takýchto prípadoch okamžite odpojte zariadenie od elektrickej siete a informujte technický servis.

- Skontrolujte, či sieťové napätie súhlasí s napätím uvedeným na typovom štítku.
- Ak sa počas nabíjania alebo pri prevádzke v sieti vyskytne porucha, odpojte sieťový adaptér.

- Zariadenie používajte len s originálnym napájacím zdrojom.

Ak má zariadenie označenie C20, možno použiť akýkoľvek napájací zdroj modelu C20.

Túto pomôcku môžu používať deti vo veku 8 rokov alebo staršie a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní pomôcky a rozumejú z toho vyplývajúcim rizikám. Deti sa so zariadením nikdy nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- Spotrebič uchovávajte mimo dosahu detí.
- Aj obalový materiál, napr. plastovú fóliu, uchovávajte mimo dosahu detí.
- Napájací kábel položte tak, aby oň nikto nemohol zakopnúť alebo naň šliapnúť.
- Napájací kábel chráňte pred poškodením. Nikdy neťahajte za napájací kábel. Pri vyťahovaní sieťového adaptéra zo zásuvky vždy uchopte samotný adaptér. Kábel udržiavajte mimo horúcich povrchov. Napájací kábel pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený.
- Spotrebič nevystavujte na dlhší čas teplotám pod 0 °C alebo nad + 40 °C. Nevystavujte spotrebič priamemu slnečnému žiareniu.
- Aby sa predišlo rizikám, opravy musia vykonávať len autorizované zákaznícke servisné centrá Aesculap.

- Ak je napájací kábel 11 poškodený, je potrebné vymeniť celý kábel so sieťovým adaptérom. Používajte iba originálny náhradný diel, ktorý môžete získať od zákaznického servisu Aesculap.
- Pri údržbe a výmene dielov odpojte zariadenie od elektrickej siete.
- Zastrihávač neotvárajte, s výnimkou výmeny nabíjateľnej batérie (pozri "Výmena nabíjateľnej batérie" na strane 19).
- Súprava nožov sa nesmie rozoberať.

POZNÁMKA

Bezpečnosť elektrických spotrebičov Aesculap je v súlade s uznávaným stavom techniky a nemeckým zákonom o bezpečnosti zariadení.

Zariadenia vyžarujúce svetlo, ako sú LED diódy alebo infračervené svetlo, neprekračujú laserovú triedu 1 podľa IEC 825-1.

Vzhľadom na súčasný stav techniky podliehajú súčasti elektrických spotrebičov časom určitému stupňu opotrebenia. Na zabezpečenie bezchybnej funkcie a bezpečnosti preto odporúčame pravidelnú kontrolu technickým zákaznickým servisom spoločnosti Aesculap Suhl GmbH. Servisné adresy
Albert Kerbl GmbH
Felizenzell 9
84428 Buchbach / Nemecko

Ďalšie adresy služieb si môžete vyžiadať na vyššie uvedenej adrese.

2.4 Bezpečnosť pri práci



NEBEZPEČENSTVO

- Nedotýkajte sa súpravy nožov, keď je spotrebič aktívny.

Spotrebič sa musí vypnúť vždy, keď:

- ho odložíte, napr. aby ste ho dobíjali alebo na krátky čas prestali strihať účes.
- nasadíte alebo odstránite hrebeňový nástavec.

Kábel sa počas prevádzky nesmie dotýkať súpravy nožov.

Zastrihávač používajte len v kombinácii s originálnym príslušenstvom (nabíjacia jednotka, hrebeňové nástavce, nabíjateľná batéria, napájací kábel so sieťovým adaptérom atď.)

2.5 lítium-iónová batéria

Prístroj sa dodáva s integrovanou dobíjateľnou lítium-iónovou batériou, ktorá sa vyznačuje veľmi vysokou kapacitou v kombinácii s nízkou hmotnosťou.

Akumulátor netrpí žiadnym "pamäťovým efektom" a pri správnom zaobchádzaní má dlhú životnosť.



NEBEZPEČENSTVO

Nesprávna manipulácia s lítium-iónovou batériou môže spôsobiť jej zničenie, výbuch alebo vznietenie.

- Preto vždy dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny.
- Chráňte batériu pred akýmkoľvek mechanickým poškodením, napr. silnými nárazmi alebo silným tlakom. V žiadnom prípade sa nepokúšajte batériu otvárať, opravovať alebo inak s ňou manipulovať.
- Nevypínajte batériu nakrátko. Ak je batéria vybratá zo spotrebiča, kontakty batérie sa v žiadnom prípade nesmú spájať kovovými predmetmi (napr. sponkou do vlasov, nožnicami alebo kovovým hrebeňom).
- Nevystavujte batériu extrémnym teplotám (pod 0 °C alebo nad + 40 °C). Vyhnite sa napríklad blízkosti vykurovacích zariadení alebo priamemu slnečnému žiareniu.

- Batériu nabíjajte len s batériou nainštalovanou v spotrebiči a s použitím originálneho príslušenstva. (nabíjacia jednotka alebo napájací kábel) a dodržiavajte správnu polaritu kontaktov.
- Batériu nabíjajte len v suchých miestnostiach a nikdy nie v blízkosti kyselín alebo ľahko horľavých materiálov.
- Batériu nevhadzujte do ohňa.
- Pre tento spotrebič používajte len originálnu batériu.
- Batéria sa nesmie dotknúť vody.
- Horiacu lítium-iónovú batériu sa v žiadnom prípade nepokúšajte hasiť vodou. Na uhasenie požiaru použite piesok alebo inú dusivú látku.
- V prípade, že z batérie unikne elektrolytický roztok, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicou. Zasiahnuté miesta okamžite opláchnite veľkým množstvom čistej vody a vyhľadajte lekára.

POZNÁMKA

Ak spotrebič nebudete dlhší čas používať, uložte spotrebič, resp. jeho batériu nabitú na 40-60 % kapacity na chladnom a pred mrazom chránenom mieste (približne 15 °C). Toto opatrenie slúži na zabránenie predčasnému starnutiu batérie.

2.6 Čistenie, starostlivosť a skladovanie



NEBEZPEČENSTVO

Zastrihávač sa musí vypnúť a odpojiť od elektrickej siete, ak:

- chcete prístroj vyčistiť alebo naolejovať.
- chcete vymeniť nabíjateľnú batériu.

Nikdy sa nepokúšajte odstraňovať prach alebo cudzie telesá z vnútra spotrebiča špicatými predmetmi (napr. chvostom hrebeňa).



POZOR

Aby ste zabránili nadmernému opotrebovaniu súpravy nožov a motora, pravidelne čistite súpravu nožov a na príslušné miesta nanášajte olej (pozri "Čistenie a starostlivosť" na strane 17).

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Napájací kábel nenavíjajte okolo zastrihávača. Mohlo by dôjsť k pretrhnutiu kábla.


- Po vybratí nabíjateľnej batérie nepripájajte zastrihávač k napájacímu káblu 11 ani ho nevkladajte do nabíjacej jednotky 8, ktorá je pripojená k elektrickej sieti. Obidve činnosti môžu poškodiť elektronický systém.

3. Príprava

3.1 Nabíjanie

Dodávaný spotrebič ešte nie je pripravený na prevádzku s nabíjateľnou batériou. Zastrihávač však môžete okamžite používať pri napájaní zo siete (pozri "Prevádzka zo siete" na strane 16).

Pred prvým použitím bez kábla by sa mal spotrebič nabíjať 2 hodiny. Spotrebič nie je možné "prebiť".

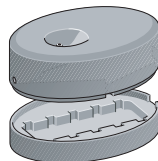

- Pred prvým nabíjaním zastrihávača vyberte nabíjaciu jednotku 8 z držiaka hrebeňového nástavca 9.
- Skontrolujte, či sieťové napätie súhlasí s napätím uvedeným na typovom štítku (na sieťovom adaptéri 10).
- Zapojte napájací kábel 11 do nabíjacej jednotky a sieťový adaptér 10 do elektrickej zásuvky.
- Nabíjaciu jednotku položte na rovný povrch.
- Spotrebič umiestnite do nabíjacej jednotky.

Indikátor nabíjania 6 zobrazuje stav nabíjania. Má 5 segmentov, z ktorých každý predstavuje približne 20 % kapacity nabíjateľnej batérie.



Batéria je vybitá.



Batéria je nabitá na 20 %.



Batéria je nabitá na 40 %.



Batéria je nabitá na 60 %.




Batéria je nabitá na 80 %.



Batéria je úplne nabitá.

3.2 Uloženie sieťového kábla

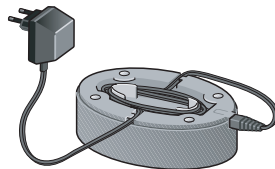

Ak nepotrebuje celú dĺžku kábla, môžete prebytočný kábel uložiť do priehradky v základni nabíjacej jednotky 8.

3.3 Uloženie hrebeňových nástavcov



Hrebienok si môžete ponechať 14 prehľadne uložené v držiaku hrebeňových nástavcov 9.

4. Operácia

4.1 Blokovanie funkcií

Pri opustení výrobného závodu je zastrihávač chránený proti náhodnému zapnutiu. Toto blokovanie funkcie môžete aktivovať sami, napr. pri preprave trimmera.

Deaktivácia funkčného zámku:

- Zastrihávač vložte do pripojenej nabíjacej jednotky 8. Rozsvieti sa indikátor nabíjania 6. Zastrihávač je pripravený na použitie.


Sieťová prevádzka zastrihávača je možná okamžite.

Aktivácia blokovania funkcií:

- Stlačte vypínač 3 na približne 4 sekundy. Použitie vypínača zapnutia/vypnutia teraz nemá žiadny účinok.

4.2 Sieťová prevádzka

V prípade potreby, napr. ak je akumulátorová batéria málo nabitá alebo nie je nabitá, môžete zastrihávač zapnúť na sieťové napájanie.

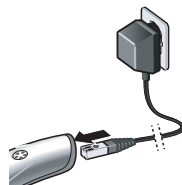

- Sieťový adaptér 10 zasunúť do elektrickej zásuvky.
- Odpojte zástrčku napájacieho kábla 11 z nabíjacej jednotky 8 a zapojte ju do zásuvky na zastrihávači.

4.3 Zapnutie a vypnutie



- Ak chcete trimmer zapnúť, stlačte vypínač 3.
- Ak chcete trimmer vypnúť, znova stlačte vypínač 3.

4.4 Nastavenie dĺžky rezu



Dĺžka rezu je nastaviteľná v troch stupňoch:


I: 0,5 mm

II: 1,5 mm

III: 2,5 mm

- Posuňte páku 5 do požadovanej polohy.

4.5 Prídavné hrebene

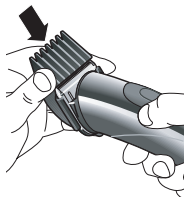

Hrebenové nástavce 14 s dĺžkami 4, 8, 12, 16 a 20 mm možno nasunúť na súpravu nožov 4.

Upozornenie: Dĺžky strihu hrebeňového nástavca a dĺžky strihu nastavené na zastrihávači sa musia sčítať.

Príklad: Výsledkom je dĺžka rezu 22,5 mm.

- Vypnite zastrihávač a nasadte požadovaný hrebeňový nástavec na súpravu nožov 4.

Teraz môžete začať zastrihávať vlasy zastrihávačom bežným spôsobom.

5. Čistenie a starostlivosť



POZOR

Na zabezpečenie správnej funkcie spotrebiča je potrebné súpravu nožov pravidelne čistiť a na príslušných miestach naolejovať. Ak súpravu nožov pravidelne nečistíte, dochádza k nadmernému opotrebovaniu súpravy nožov a motora

Čistenie súpravy nožov




POZOR

Poškodenie súpravy nožov spôsobené jej rozoberaním na jednotlivé časti!

- Súpravu nožov nikdy nerozoberajte. Po rozobratí ju nemožno

Pri pravidelnom používaní by sa mala sada nožov 4 raz denne dôkladne vyčistiť.

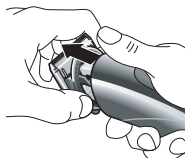

- Vypnite spotrebič.
- Vytlačte celú súpravu nožov z prednej časti zastrihávača.
- Pomocou čistiacej kefky 13 znovu odstráňte všetky chlpy.
- Mierne od seba odsuňte hornú a dolnú časť súpravy nožov (pozri obrázok) a pomocou čistiacej kefky odstráňte všetky chlpy medzi nimi.

Mazanie súpravy nožov

Súprava nožov 4 sa musí pravidelne olejovať - najlepšie raz za mesiac.




- Vyberte súpravu nožov.
- Namažte miesta, kde dochádza ku kontaktu medzi hornou a dolnou časťou súpravy nožov (pozri obrázok).
- Zastrihávač spúšťajte približne 20 sekúnd, aby ste sa uistili, že je olej správne rozmiestnený. - Ak chcete, môžete pokračovať v práci.

Výmena súpravy nožov

Súprava nožov podlieha opotrebovaniu. Aj keď sa o spotrebič riadne staráte, výkon rezania sa zníži. Keď sa súprava nožov opotrebuje, vymeňte ju. Súpravu nožov si môžete objednať samostatne ako náhradný diel v zákazníckom servise Aesculap (pozri adresy na konci tohto návodu).

Pripevnenie súpravy nožov

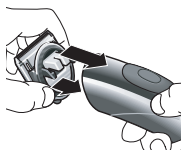

- Vypnite spotrebič.
- Najskôr umiestnite spodné výstupky do priehlbín v zastrihávači, potom zatlačte sadu nožov domov a otočte ju smerom nahor. Nepoužívajte silu. Musíte počuť, ako súprava nožov pevne zapadne na miesto.

Čistenie spotrebiča

- Spotrebič občas vyčistite vlhkou handričkou a potom ho utrite dosucha.

Čistenie nabíjacích kontaktov

Ak sú nabíjacie kontakty 2 na spotrebiči alebo nabíjacie kontakty 7 na nabíjacej jednotke znečistené, nabíjanie nemusí byť možné alebo sa môže prerušiť.

- Vyčistite kontakty pomocou handričky alebo vaty namočenej v alkohole alebo liehu.

6. Výmena dobíjacej batérie

Ak kapacita nabíjateľnej batérie začne klesať, môžete si v zákazníckom servise Aesculap objednať novú batériu a vložiť ju namiesto starej.


Používajte iba originálnu nabíjateľnú batériu Aesculap, ktorú si môžete objednať v zákazníckom servise Aesculap.

Pri likvidácii starej batérie dbajte na dodržiavanie predpisov o likvidácii (pozri časť "Likvidácia" na strane 22).




POZOR


Pri výmene akumulátora nesmie byť napájací kábel 11 nikdy zapojený do zastrihávača.

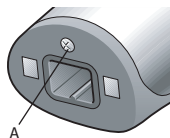

- Odskrutkujte skrutku A vedľa zásuvky 1 na spodnej strane zastrihávača.

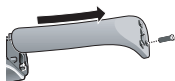

- Posuňte kryt zo zastrihávača.

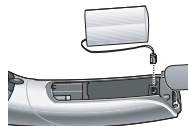


- Vyberte starú nabíjateľnú batériu zo zastrihávača a opatrne odpojte mini zástrčku potiahnutím smerom nahor.



POZOR

Ak v zastrihávači nie je akumulátor, zastrihávač nepripájajte

Ak v zastrihávači nie je akumulátor, nepripájajte ho k napájacíemu káblu 11 ani ho neumiestňujte do nabíjacej jednotky 8, ktorá je pripojená k elektrickej sieti. Obidve činnosti môžu poškodiť elektronický systém.

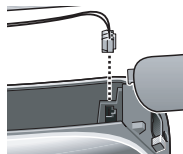

- Opatrne zasuňte mini zástrčku nového akumulátora do zastrihávača tak, aby zapadla do príslušnej zásuvky.
- Vložte novú dobíjaciú batériu, nasadte kryt späť na zastrihávač a zaskrutkujte poistnú skrutku.

7. Čo mám robiť, ak ...

... spotrebič sa nezapína?

- Je aktivovaný zámok funkcií? Vložte zastrihávač do pripojenej nabíjacej jednotky, aby ste deaktivovali zámok funkcií.
- Je batéria vybitá? Nabíjajte zastrihávač v nabíjacej jednotke alebo pracujte so sieťovým napájaním (napájací kábel zapojený priamo do zastrihávača).
- Nabíjanie zastrihávača pri vysokých teplotách okolia ($>35^{\circ}\text{C}$) môže spustiť bezpečnostnú poistku, ktorá dočasne zastaví činnosť spotrebiča. Nechajte zastrihávač vychladnúť po dobu 5-10 minút. Potom je zastrihávač opäť pripravený na prevádzku.

... sada nožov sa "drží"?

- Súprava nožov sa musí vyčistiť a naolejovať.
Postupujte podľa popisu na strane 18.

... žiadny zo segmentov indikátora nabíjania sa nerozsvieti?

- Vyčistite nabíjacie kontakty.
- Spotrebič nemusí byť správne umiestnený v nabíjacej jednotke. Umiestnite ho správne.
- Napájací kábel nemusí byť správne pripojený.
- Nabíjacia batéria je úplne vybitá a jej nabíjanie trvá dlhšie.

... sa spotrebič sám vypne?

- Batéria je vybitá. Nabíjajte zastrihávač v nabíjacej jednotke alebo pracujte so sieťovým napájaním (napájací kábel zapojený priamo do zastrihávača).

... je čas prevádzky na jedno nabitie batérie oveľa kratší ako predtým?

- Súpravu nožov môže byť potrebné vyčistiť a naolejovať. Postupujte podľa opisu na strane 18.
- Ak to nepomôže, objednajte si v zákazníckom servise Aesculap novú dobíjaciu batériu a vložte ju namiesto starej (pozri "Výmena dobíjacej batérie" na strane 19).

... batéria sa už nebude nabíjať?

- V Aesculap Cus-tomer Service si objednajte novú dobíjaciu batériu a vložte ju namiesto starej (pozri "Výmena dobíjacej batérie" na strane 19).

8. Technické údaje

Produkt	Akkurata/Vega
Sieťový adaptér:	
Vstupné napätie	230 V / 50 Hz DC
Výstupné napätie	4.85 V, 800 mA
Hladina emisného akustického tlaku	$L_{pA} \leq 70 \text{ dB(A)}$
Celková hladina vibrácií	$a_h = 3.59 \text{ m/s}^2$ $k = 0.39 \text{ m/s}^2$
Dĺžky rezu (bez hrebeňového nástavca)	0.5; 1.5; 2.5 mm
Hrebeňové nástavce	4, 8, 12, 16, 20 mm
Rozmery (D x Š x V)	170 mm x 46 mm x 46 mm
Hmotnosť (zastrihávač)	<250 g



Podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia

9. Likvidácia



Tento elektrický spotrebič obsahuje lítium-iónovú batériu. Pred likvidáciou je potrebné akumulátor vybrať (pozri "Výmena akumulátora" na strane 19). Dobíjateľná batéria sa nikdy nesmie likvidovať ako domový odpad.

Ak elektrospotrebič už nebude používať, vráťte ho na miesto, kde ste ho kúpili, alebo ho odovzdajte v špeciálnom zbernom stredisku, ktoré prevádzkuje miestny orgán pre likvidáciu odpadu (recyklačné stredisko, stredisko na zhodnocovanie materiálov atď.). Spotrebič sa nesmie likvidovať ako domový odpad. To platí aj pre elektrospotrebiče, ktoré boli naposledy použité v inom ako súkromnom sektore, napr. v odvetviach obchodu alebo priemyslu. V prípadoch, keď verejné orgány na likvidáciu odpadu neprijímajú elektrospotrebiče, ktoré sa používali na iné ako súkromné účely, ich poradenské služby v oblasti odpadu môžu poskytnúť informácie o ekologickej likvidácii.

12. Dvojročná záruka

Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste si vybrali výrobok našej spoločnosti. Už desaťročia je meno Aesculap symbolom overenej kvality a prvotriednych služieb. Sme známi tým, že našim zákazníkom poskytujeme inovatívne, vysoko výkonné výrobky. Spoločnosť Aesculap vyrába vysokokvalitné zariadenia s použitím kvalitných materiálov a starostlivých výrobných postupov. Chceli by sme vás upozorniť, že nenesieme zodpovednosť za chyby našich výrobkov, ak sú spôsobené nesprávnym používaním, bežným opotrebovaním alebo sú spôsobené nesprávnym používaním výrobku, prípadne použitím nevhodných alebo nesprávne fungujúcich výrobkov tretích strán.

Časti, ktoré zvyčajne podliehajú opotrebovaniu, a za ktoré preto nenesieme zodpovednosť, sú batéria a strihacia hlava. Z našej záruky sú vylúčené aj závady, ktoré nemajú vplyv alebo len zanedbateľne ovplyvňujú hodnotu alebo funkciu výrobku. Ak sme zodpovední v rámci našej záruky, vyhradujeme si právo výrobok opraviť alebo vymeniť.

Servisné adresy

Albert Kerbl GmbH
Felizenzell 9
84428 Buchbach /
Nemecko Tel:
+49 (0) 8086 933-100 Fax:
+49
(0) 8086 933-500 E-mail:
info@kerbl.com
www.kerbl.com

Ďalšie adresy služieb si môžete vyžiadať na vyššie uvedenej adrese.