

CLIPSTER

FarmClipper4

#18192

SK Návod na použitie



VETIS

Partner chovateľov

1. Bezpečnostné predpisy

1.1 Všeobecné informácie

Tieto bezpečnostné predpisy obsahujú základné informácie, ktoré sa musia dodržiavať pri inštalácii, prevádzke a údržbe. Všetky osoby pracujúce na zastrihávači a s ním si musia prečítať návod na obsluhu. Návod na obsluhu musí byť trvalo k dispozícii na mieste používania stroja.

1.2 Základné bezpečnostné pokyny

Dodržiavajte právne predpisy o pravidelných prehliadkach. Dodržiavajte aj predpisy o priemyselnej bezpečnosti.

1.2.1 Napájanie

Zástrčku zasúvajte len do správne nainštalovaných zásuviek. Chybná elektrická inštalácia môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo skrat. Zásuvky by mali byť vybavené prúdovým chráničom (FI). Dodržiavajte príslušné miestne predpisy. Údržbu a čistenie vykonávajte len po vytiahnutí zástrčky zo zásuvky. Nikdy nenechávajte stroj bez dozoru, keď je zapojený do zásuvky. Strihanie zvierat je prípustné len vtedy, ak sú deti mimo miesta strihania. Strojček neukladajte v dosahu detí!

1.2.2 Povinnosť údržby a servisu

Na strihanie nikdy nepoužívajte poškodený stroj. Opravu krytu alebo poškodeného elektrického kábla povoľte len autorizovanému technickému personálu.

1.2.3 Žiarenie

Skúška strihača spĺňa základné požiadavky na ochranu podľa harmonizovaných európskych noriem smernice EHS. Smernica EÚ: 83/336/EHS z 3.5.1989

1.2.4 Zostávajúce riziká

Upozornite nás na prevádzkové nebezpečenstvá a riziká, ktoré pri priamom strihaní zvierat nehrozia. To platí aj pre ohrozujúce technické závady.

1.3 Požiadavky na používateľa

Dodržiavajte pokyny uvedené v tejto príručke, aby ste zaistili bezpečné používanie zastrihávača.

- Používateľ si prečítal návod na obsluhu a porozumel mu alebo mu odborník vysvetlil obsluhu a upozornil na riziká.
- Používateľ má skúsenosti so strihaním zvierat. Strihač by nemali používať deti a slabé osoby (bez dozoru).

2. Určené použitie

2.1 Predpokladaný účel

Strihač je určený výlučne na strihanie dobytky, koní alebo veľkých psov. Akékoľvek iné použitie, najmä na ľudí, je výslovne zakázané.

2.2 Technické údaje

Kat.číslo:	18192
Napätie:	220 – 240 V AC
Menovitá hodnota motora:	200 W
Frekvencia:	50/60 Hz
Rozmery (Š/V/L):	80 x 62 x 295 mm
Hmotnosť bez kábla:	1190 g
Hladina akustického tlaku:	85 dB (A)
Počet zdvihov:	0,5 3000/ min
Trieda ochrany:	II

Prevádzkové podmienky

Maximálna teplota okolia:	0 – 40° C
Maximálna vlhkosť vzduchu:	10 – 90 % (relatívne)

2.3 Vybavenie

1 strihač so strihacou hlavou, 1 sada strihacích nožov (namontovaných), (100 ml), 1 skrutkovač, 1 návod na obsluhu a 1 puzdro

3. Prvé uvedenie do prevádzky

3.1 Kontrola a návod na obsluhu

Nevhodné používanie elektrických zariadení, najmä zariadení na chov zvierat, je nebezpečné! Preto pred spustením stroja dodržiavajte nasledujúce opatrenia na predchádzanie nehodám: - Nikdy nezapínajte stroj bez riadne namontovaných pripínacích štítkov - Údaje o voltach na typovom štítku musia zodpovedať napätiu v sieti. Stroj sa smie prevádzkovať len na striedavý prúd - Zabráňte akémukoľvek kontaktu s pohyblivými nožmi - Pred údržbovými prácami vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky! Nedotýkajte sa oblasti nožov, ani keď je stroj vypnutý, pokiaľ je stroj pripojený k zdroju prúdu - Stroj vždy umiestnite na suchý povrch a skladujte v suchých priestoroch - Vyhňte sa akémukoľvek kontaktu so strojom, ktorý je v kontakte s kvapalinami. Nikdy nestrihajte mokré zvieratá. Kvapaliny, ktoré prenikli do stroja, znižujú elektrickú izoláciu. Hrozí bezprostredné nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo skratu. Stroj čistite len suchou handrou a maliarskou kefou alebo štetcom - Kábel ležiaci na podlahe sa môže zachytiť a byť nebezpečný. Kábel pred pripnutím položte opatrne a bezpečne. Zabráňte prekrúteniu alebo zamotaniu prípojného kábla zastrihávača. Dbajte na to, aby zvieratá nestáli na kábli, neprechádzali po ňom a nezachytávali sa oň. Kábel udržiavajte mimo horúcich povrchov. Nikdy nenamotávajúte kábel okolo strojčeka. Môže to mať za následok poškodenie izolácie a prerušenie kábla. Kábel pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený - Pred vytiahnutím zástrčky zo siete nastavte vypínač stroja do polohy vypnuté (obr. 3).

- Nepoužívajte poškodené nože s odlomenými zubami. Používajte len ostré nože. Používajte len originálne nože nožnic. - Nikdy nekladajte predmet do otvoru stroja. Hluk stroja môže rušiť zvieratá. Kopnutie alebo váha zvieratá môže mať za následok čiastočné poranenia. Preto zviera dostatočne fixujte. - Zvieratá strihajte len vtedy, keď k miestu strihania nemajú prístup nepovolane osoby - strihajte len v dobre vetraných miestnostiach a nikdy nie v blízkosti výbušných materiálov. Tieto bezpečnostné pokyny sa musia dodržiavať vo všetkých prípadoch!

3.2 Nastavenie čepele pomocou napínacej skrutky

Pri uvedení do prevádzky ho nastavte takto:

Pred orezaním: Pri vypnutom stroji otočte napínicu skrutku na prvý výrazný odpor. Potom pokračujte v otáčaní napínacej skrutky o ďalšiu 1/4 otáčky.

Počas strihania: Ak nože už dostatočne nestrihajú, prestavte napínaviu skrutku o štvrtinu otáčky. Ak sa resetovanie nepodarí, čepele sú tupé a musia sa naostriť. Dávajte pozor, aby ste neprekročili napätie strihu. Počas strihania občas mierne obnovte napnutie strihacích nožov. Vlasy sa môžu hromadiť medzi strihacími čepeľami, ak striháte s nedostatočným strihacím napätím. To negatívne ovplyvňuje postup strihania alebo ho dokonca znemožňuje! V takomto prípade je potrebné strihacie nože rozobrať, vyčistiť, naolejovať a znovu zložiť podľa bodu 4.2. Vyhnite sa príliš vysokému prítlaku na plech, pretože sa tým zvyšuje teplota a opotrebovanie. Výrobca dodané nožnice plne nastavil na strihanie.

3.3 Správne olejovanie strihacích hláv

Najčastejšou chybou, ktorá spôsobuje neuspokojivý výsledok strihania a zahrievanie strihača, je nedostatočné mazanie. Lahký olejový film na strihacích nožoch je nevyhnutný na dosiahnutie optimálneho výsledku strihania, ako aj na zvýšenie životnosti strihacích nožov a stroja. Všetky ostatné pohyblivé časti strihacej hlavy musia byť tiež dobre namazané. Kvapkajte olej na strihacie nože a do olejového otvoru strihacej hlavy (**obr. 1 + 2**) každých 10 minút, aby nedošlo k ich vyschnutiu. Používajte len náš špeciálny olej do strihacích strojčekov.

3.4 Zapnutie/vypnutie

Posuvný prepínač má dve polohy (**obr. 3**, zobrazuje polohu 0)

- - Poloha 1: Stroj je zapnutý
- - Poloha 0: Stroj je vypnutý

Pred zapojením skontrolujte polohu spínača. Spínač musí byť v polohe 0. Posuvný spínač používajte len na zapnutie a vypnutie stroja.

4. Údržba

Pred začatím údržby stroj vypnite a vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky. Pred prácou na nožniciach/vypínacej hlave vždy najprv odpojte napájací zdroj. Nedotýkajte sa oblasti strihacích nožov, aj keď je stroj vypnutý, pokiaľ je strihač stále pripojený k zdroju prúdu.

4.1 Čistenie

Po skončení strihania utrite olej zo strojčeka, strihacej hlavy a strihacích nožov suchou handričkou a odstráňte chlpy suchou kefou alebo štetcom. Potom zľahka naolejujte všetky časti, aby ste zabránili hrdzaveniu. Upozorňujeme, že aj tie najmenšie hrdzavé škvrny výrazne zhoršujú strihanie alebo ho dokonca úplne znemožňujú.

4.2 Montáž strihacích nožov

Súprava strihacích nožov sa skladá zo spodnej dosky a hornej dosky. Pri montáži strižných nožov dávajte pozor, aby správne dosky ležali na sebe.

Čepele zostavte takto:

- Uvoľnite napínaviu skrutku zastrihávača a položte zastrihávač na tvrdý povrch tak, aby skrutky na upevnenie čepele smerovali nahor.
- Uvoľnite skrutky na upevnenie čepele a vyberte dve staré čepele.
- Uistite sa, že nové strihacie nože sú čisté. Dbajte najmä na to, aby naostrené miesta boli bez nečistôt; inak nie je možné dosiahnuť uspokojivý výsledok strihania ani s novo naostrenými strihacími čepeľami.
- Novú hornú dosku vložte do vodiacich líšt výkyvnej hlavy a potom na naostrené miesta naneste niekoľko kvapiek oleja.
- Teraz zasuňte novú spodnú dosku medzi uvoľnené skrutky (**obr. 4**).
- Hneď po nastavení strihacích nožov zafixujte polohu spodnej dosky a utiahnite upevňovacie skrutky.

4.3 Obrúsenie nožov

Správne nabrúsenie nožnicových nožov je možné len na špeciálnych strojoch a v špecializovanom odbore. Používajte len ostré nože. Vadné nože s odlomenými zubami alebo tupé nože sa musia vymeniť.

4.4 Uloženie strihača

Medzi zastrihávaním vždy uchovávajte dobre vyčistený a namazaný zastrihávač v dodanom puzdre na suchom mieste, ktoré nie je prístupné deťom. Strojček nezapínajte, ak máte podozrenie, že sa doň mohli dostať tekutiny. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo skratu. Strojček dajte do servisu!

4.5 Čistenie strihacej hlavy

Po niekoľkých dňoch používania vyčistite hlavu zastrihávača. Rozoberte strihacie dosky. Uvoľnite obe skrutky a odstráňte strihaciu hlavu z pohonnej jednotky. Teraz dôkladne vyčistite vnútro strihacej hlavy a ostatné súčasti pomocou kefký a štetca. Po dôkladnej montáži namažte strihaciu hlavu podľa bodu 3.3.

5. Opravy


5.1 Úvod

Na ďalšej strane si môžete prečítať o opatreniach na riešenie problémov. Opatrenia na odstraňovanie porúch označené symbolom * smie vykonávať len oprávnený technický personál.

5.2 Zoznamy funkčných chýb

Pre opravu neuvedených porúch sa obráťte na autorizovaný servis.

6. Ochrana životného prostredia a likvidácia

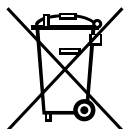

Používateľ je zodpovedný za správnu likvidáciu nožnicových nožov a strihača po skončení ich životnosti. Dodržiavajte príslušné miestne predpisy. Spotrebič nelikvidujte spolu s domácim odpadom. V rámci smernice EÚ upravujúcej likvidáciu elektrických a elektronických spotrebičov spotrebič bezplatne prijímajú miestne zberné miesta odpadu alebo recyklačné strediská. Správna likvidácia zabezpečí ochranu životného prostredia a zabráni prípadnému škodlivému vplyvu na ľudí a životné prostredie.

5.2 Zoznamy funkčných chýb


Súčasť motora	Príčina:	Riešenie problémov
Motor nefunguje	- Žiadny aktuálny - Chybný kábel - Poškodené spínače alebo motor	Skontrolujte zásuvky a poistky * Nechajte vymeniť v špecializovanej dielni * Nechajte vymeniť v špecializovanej dielni
Motor sa zahreje	- Krytky privodu vzduchu sú upchaté - Príliš vysoké napätie strižných nožov	Vyčistite alebo vymeňte krytky privodu vzduchu Utiahnite napínaciu skrutku menej. Vymeňte nože, ak už potom nerezú
Motor beží veľmi pomaly	- Poškodený rotor alebo pólový krúžok - Uhlíková kefka sa opotrebovala	* Nechajte vymeniť v špecializovanej dielni * Nechajte vymeniť v špecializovanej dielni
Vibrácie motora	- Rotor beží nepravdivo - Ložiská sú opotrebované - Poškodené koleso ventilátora	* Nechajte vymeniť v špecializovanej dielni * Nechajte vymeniť v špecializovanej dielni * Nechajte vymeniť v špecializovanej dielni
Motor vydáva veľmi hlasné zvuky	- Chybné ložiská	* Nechajte vymeniť v špecializovanej dielni

Strihacia hlava	Príčina	Troubleshooting
Horná doska sa nepohybuje	- Chybná prevodovka	* Nechajte vymeniť v špecializovanej dielni
Horná doska sa nepohybuje po celej kontaktnej ploche	- Excentricky opotrebované - Poškodený excentrický hriadeľ	* Nechajte vymeniť v špecializovanej dielni * Nechajte vymeniť v špecializovanej dielni
Čepele sa zle strihajú	- Horná alebo spodná čepeľ je tupá - Čepele nie sú dobre nabrúsené - Príliš nízke napätie strihacieho noža	* Nechajte vymeniť v špecializovanej dielni * Nechajte vymeniť v špecializovanej dielni Zvýšenie napätia pomocou napínacej skrutky
Čepele nerezú	- Excentrický defekt - Poškodená prevodovka - Opotrebovaná strihacia hlava	* Nechajte vymeniť v špecializovanej dielni * Nechajte vymeniť v špecializovanej dielni * Nechajte vymeniť v špecializovanej dielni
Hlava zastrihávača sa veľmi zahrieva	- Príliš vysoké napätie strihacej čepele - strihací nôž a/alebo excenter bez mazacieho filmu	Znížte napätie strižných nožov, prípadne ich prebrúste a premažte olejom SAE 30 HD




☞ Vyhlásenie o zhode so symbolom CE/CE


Spoločnosť VETIS s.r. o. týmto vyhlasuje, že výrobok/zariadenie opísané v tomto návode na použitie spĺňa základné požiadavky a iné príslušné ustanovenia a predpisy. Označenie CE potvrdzuje zhodu so smernicami Európskej únie. Vyhlásenie o zhode si môžete pozrieť na stránke: <http://www.kerbl.de/artikel/18192>

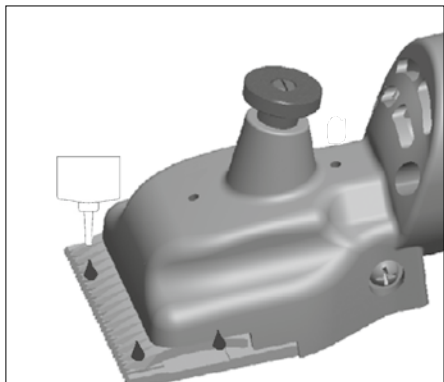


1

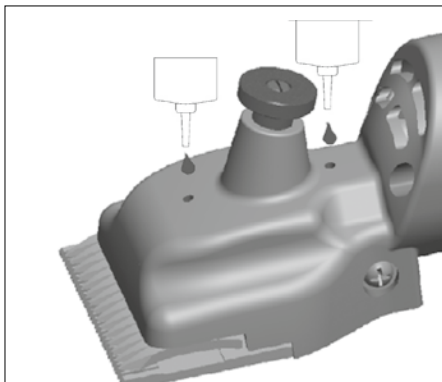

2

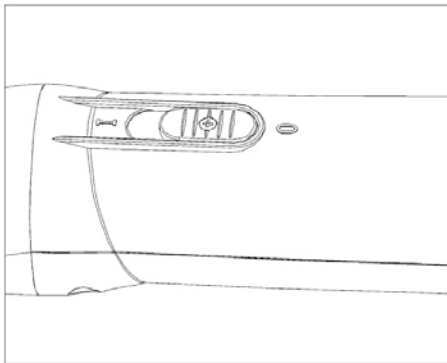

3

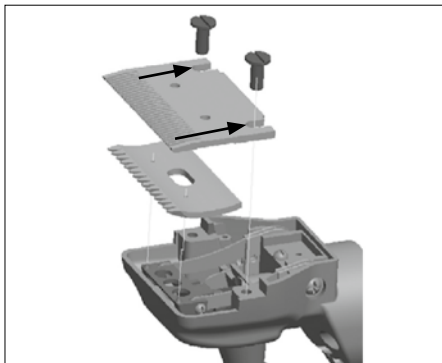

4



VETIS Kráľovičové Kračany

Centrálny sklad a sídlo firmy
930 03 Kráľovičové Kračany 91
Tel.: 031/ 55 14 112

Mob: 0918/ 514 112

E-mail: vetis@vetis.sk