

CLIPSTER

CuttoX

#18459

(SK) Návod na použitie



VETIS
Partner chovateľov

Návod na použitie

1. Bezpečnosť

Pred použitím zastrihávača si pozorne prečítajte návod na použitie, najmä časť "Bezpečnosť".

Pomôže vám to vyhnúť sa možným nebezpečenstvám a ochráni vás to pred poškodením zariadenia v dôsledku nesprávneho používania. Návod na použitie si uschovajte po ruke, aby ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť. Ak zariadenie odovzdáte novému majiteľovi, odovzdajte mu aj tento návod na použitie.

1.1 Vysvetlenie pojmov a symbolov

V tomto návode na použitie sa používajú nasledujúce pojmy:



Ak sa nerešpektuje, môže to viesť k vážnym zraneniam alebo smrti



Ak sa nerešpektuje, môže to viesť k vážnym zraneniam (alebo smrti).

Poznámka

Informácie, ktoré je potrebné dodržiavať pri manipulácii so zariadením.



Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Prístroj sa nesmie nabíjať ani prevádzkovať vo vani, sprche, nad naplneným umývadlom/iným kontajnerom.

1.2 Predpokladané použitie

- strojček sa používa na zastrihávanie vlasov/srsti
- zariadenie je určené len na použitie v interiéri. Nemal by sa používať vo vonkajšom prostredí (záhrada, terasa atď.).
- ak sa zariadenie používa spôsobom, ktorý nie je v súlade s určeným použitím, a/alebo ak sa na zariadení vykonávajú úpravy, zaniká tým záruka a zodpovednosť výrobcu



1.3 Dôležité upozornenia na nebezpečenstvo

- zariadenie, nabíjaci zásobník a pripojovací kábel uchovávajte mimo dosahu vlhkosti, vody a iných kvapalín a nepoužívajte ho mokrými rukami.
- neponárajte zariadenie, nabíjaciu vaničku a pripojovací kábel pod vodu ani ich neoplachujte pod tečúcou vodou
- ak zariadenie spadne do vody, nesmie sa potom už používať
- integrácia prúdového chrániča s menovitým vypínacím prúdom menším ako 30 mA do inštalácie budovy poskytuje dodatočnú ochranu. Odporúčame vám, aby ste požiadali svojho elektrikára o inštaláciu prúdového chrániča pre vaše elektrické obvody.
- zariadenie sa musí odpojiť od elektrickej siete, keď je batéria nabitá alebo po uplynutí najmenej 8 hodín čistého času nabíjania
- ak sa batéria po 8 hodinách úplne nenabije, zariadenie nepoužívajte a kontaktujte výrobcu



The clipping head can become hot after extended use!



Zastrihávač sa môže prevádzkovať len s napájacím zdrojom, ktorý spĺňa špecifikácie uvedené na výrobnom štítku. Zariadenie sa môže prevádzkovať len s napájacím zdrojom, ktorý dodáva výstupné napätie SELV uvedené na označení zariadenia.

1.4 Všeobecné bezpečnostné pokyny



NEBEZPEČENSTVO

Zariadenie nikdy nepoužívajte, ak:

- zariadenie, nabíjaci zásobník alebo pripojovací kábel je poškodený
- strihacia hlava je poškodená alebo naštiepená, preto môže poraniť pokožku
- zariadenie spadlo, vykazuje viditeľné poškodenie alebo je narušená jeho funkčnosť
- zariadenie je poškodené tak, že sú odhalené elektrické komponenty.

V každom prípade sa zariadenie musí okamžite odpojiť od elektrickej siete!

Túto pomôcku môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti a znalosti, ak sú pod dohľadom alebo boli vyškolené v bezpečnom používaní pomôcky a rozumejú základným nebezpečenstvám. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a užívatelskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- deti by mali byť neustále pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať. Dbajte na to, aby sa deti o klipovú hlavicu nezranili. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Udržujte mimo dosahu detí aj obalový materiál, napr. fólie.
- prívodný kábel položte tak, aby oň nikto nemohol zakopnúť alebo naň stúpiť
- chráňte pripojovací kábel pred poškodením. Nikdy neťahajte za pripojovací kábel. Pripojovací kábel vždy vytiahnite zo zásuvky uchopením za zástrčku napájacieho akumulátora. Kábel udržiavajte mimo horúcich povrchov. Pripojovací kábel pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený.
- Nikdy nevystavujte zariadenie dlhodobo teplotám pod 0 °C alebo nad +40 °C. Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu.
- Opravy smie vykonávať len oprávnený personál, aby sa predišlo nebezpečenstvu
- na účely údržby a výmeny dielov odpojte zariadenie od napájania
- strihacia hlava sa nesmie rozoberať

1.5 Bezpečnosť pri práci



NEBEZPEČENSTVO

Nikdy sa nedotýkajte strihacej hlavy ani do nej nesiahajte, keď je zariadenie zapnuté.

Strihacia hlava sa musí pravidelne čistiť a namazať na príslušných miestach, aby sa zabezpečila bezproblémová prevádzka.

Zariadenie sa musí vypnúť, keď:

- keď zariadenie odložíte, napr. na nabíjanie alebo keď na krátky čas prerušíte rezanie.
- nasadíte alebo odoberiete hrebeňový nástavec
- čistíte alebo olejujete zariadenie
 - Zastrihávač používajte len s originálnym príslušenstvom (nabíjaci zásobník, hrebeňový nástavec atď.).
 - Nikdy nepoužívajte ostré predmety (napr. hrebeň na chvost) na odstránenie prachu alebo cudzích predmetov z vnútra zariadenia.

2. Nabíjanie

- keď je zariadenie dodané, nie je ešte pripravené na prevádzku
- pred pripojením zastrihávača do zásuvky sa uistite, že napätie v sieti zodpovedá napätiu uvedenému na výrobnom štítku napájacieho súboru
- v záujme zachovania kapacity nabitia akumulátora odporúčame, aby ste akumulátor občas vybíjali prevádzkou zariadenia, kým sa motor nezastaví
- pred prvým použitím zariadenie nabíjajte celých 8 hodín, aby sa aktivovala dodaná nabíjateľná batéria
- nenabíjajte zariadenie pri teplotách nižších ako 0 °C alebo vyšších ako 40 °C
- nenabíjajte zariadenie, ak je vystavené priamemu slnečnému žiareniu alebo teplu radiátora
- štandardný čas nabíjania je 8 hodín. Vyhnite sa dlhšiemu času nabíjania, aby ste zabránili poškodeniu batérie.
- keď je zariadenie úplne nabité, možno ho používať dlhšie ako 60 minút. Počas nabíjania svieti červená kontrolka.
- Ak chcete zariadenie používať, presuňte prepínač do polohy ON.

3. Rozsah dodávky

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1 Clipper | 5 Čistiaca kefa |
| 2 Hrebeň (3 mm) | 6 Nabíjačka |
| 3 Hrebeň (6 mm) | 7 Olejček |
| 4 Hrebeň (9 mm) | 8 Nabíjací stojanček |



4. Prevádzka, čistenie a starostlivosť

Zapnutie a vypnutie:

Posunutím prepínača zapnutia/vypnutia dopredu zariadenie zapnete. Posunutím vypínača dozadu zariadenie vypnete (obr. 1). Tento zastrihávač je možné používať prostredníctvom jeho kábla, ako aj bez kábla.

Pripojte napájací adaptér do zásuvky zariadenia, ktorá sa nachádza na spodnej strane zariadenia. Potom pripojte napájací blok k napájaniu (obr. 2).



Obr.1



Obr.2

Používanie príslušenstva hrebeňa:

1. Pri inštalácii a demontáži hrebeňa sa uistite, že je zastrihávač vypnutý. K dispozícii sú tri hrebene (3, 6, 9 mm) pre rôzne dĺžky strihu. Hrebeň nasadíte na strihaciu hlavu spredu a uistite sa, že hrebene zapadajú do spodnej časti (obr. 3).
2. Stlačte hrebeň smerom nahor, ako je znázornené na obr. 4, aby ste ho mohli vybrať.
3. Hrebeň potom môžete vymeniť za inú veľkosť, pričom postupujte podľa bodu 1.



Obr.3



Obr.4

Zariadenie pravidelne čistite a olejujte, aby ste zabezpečili bezproblémovú funkciu a plný funkčný výkon zastrihávačov.

Čistenie strihacej hlavy:

Strihacia hlava by sa mala pri pravidelnom používaní raz denne dôkladne vyčistiť.

Zariadenie vypnite. Odpojte zariadenie od napájania. Vyberte hrebeňový nástavec. Odstráňte vlasy pomocou čistiacej kefy.

Mazanie strihacej hlavy:

Strihacia hlava musí byť naolejovaná, aby sa zabezpečili dobré výsledky strihania strihacej hlavy na čo najdlhšiu dobu (počas prevádzky každých 15 minút a pri skladovaní najlepšie denne). Odstráňte hrebeňový nástavec. Pomocou kefy vyčistite strihacie ostrie a odstráňte chlpy medzi čepeľami. Miesta, kde sa dotýka horná a dolná časť strihacej hlavy, naolejujte. Prístroj je potrebné naolejovať okamžite, keď sa strihací výkon výrazne zníži alebo sa zdá, že teplota strihacej hlavy je príliš vysoká. Strihacia hlava by sa mala naolejovať raz denne, keď sa strihač nepoužíva.

Výmena strihacej hlavy:

Strihacia hlava je opotrebovávaná časť. Napriek dobrej starostlivosti sa výkon strihania zníži. V tomto okamihu by sa mala strihacia hlava vymeniť. Strihacia hlava sa dá objednať samostatne ako náhradný diel (ref. č. 18458). Pri výmene strihacej hlavy môžete odstrániť zvyšky vlasov vo vnútri strihača pomocou kefy.

Ak chcete strihaciu hlavu vybrať, odstráňte obe skrutky na zadnej strane. Tieto skrutky uschovajte na bezpečnom mieste pre opätovnú inštaláciu novej strihacej hlavy.

Čistenie zariadenia:

Zariadenie občas utrite vlhkou handričkou a potom ho osušte.

5. Riešenie problémov

Čo robiť, keď...

... sa zariadenie nedá zapnúť?

- je batéria vybitá? Pripojte napájací akumulátor a nabite zastrihávač
- je strihacia hlava suchá? Strihacia hlava musí byť naolejovaná

... strihacia hlava nepracuje hladko?

- strihacia hlava musí byť naolejovaná
- horné a dolné nože sa môžu pri dlhšom nepoužívaní zaseknúť

... sa pri nabíjaní nerozsvieti displej nabíjania?

- skontrolujte, či je napájací blok správne pripojený.

... zariadenie sa samo vypne?

- batéria je vybitá. Nabíjanie zastrihávačov

... batériu sa už nedá nabíjať?

- batéria alebo napájací blok je poškodený. Napájací blok je možné doobjednať. Ak je batéria chybná, zariadenie sa musí riadne zlikvidovať.

6. Technické údaje

	Clipper	Napájacia súprava
Kat.číslo	18459	
Rýchlosť motora	6000 rpm	-
Doba nabíjania	8 h	-
Doba strihania	60 min	-
Hmotnosť	120 g	69 g
Vstupné napätie	2,4 V DC	100-240 V
Frekvencia	-	50/60 Hz
Kapacita akumulátora	800 mAh	-
Aktuálna spotreba	max. 800 mA	0.2 A
Proces nabíjania/používania pri teplote okolia	0°C - 40 °C	0°C - 40 °C
Ochranná trieda	III	II



Elektronický odpad

Za likvidáciu tohto zariadenia po skončení jeho životnosti je zodpovedný prevádzkovateľ. Prečítajte si platné vnútroštátne predpisy. Zariadenie sa nesmie likvidovať v domácom odpade. V súlade s ustanoveniami smernice EÚ o likvidácii elektrických a elektronických zariadení je možné zariadenie bezplatne zlikvidovať v miestnom zbernom alebo recyklačnom stredisku. Prípadne ho môžete odovzdať predajcom, ktorí ponúkajú službu zberu. Správna likvidácia pomáha zabezpečiť ochranu životného prostredia a zabráňuje akýmkoľvek nepriaznivým účinkom na ľudské zdravie a životné prostredie.



Vyhlásenie o zhode CE

Spoločnosť VETIS s.r.o. týmto vyhlasuje, že výrobok/zariadenie opísané v tomto návode na použitie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia a predpisy. Označenie CE potvrdzuje zhodu so smernicami Európskej únie.



VETIS Kráľovičové Kračany

Centrálny sklad a sídlo firmy
930 03 Kráľovičové Kračany 91
Tel.: 031/ 55 14 112

Mob: 0918/ 514 112

E-mail: vetis@vetis.sk