

Aesculap

Econom CL

Econom CL

Equipe Econom

CL Fitter



SK

Návod na použitie/technický popis

Strojček na strihanie dobytky a koní

Econom CL (GT800)

Econom CL Set 1 batéria (GT804)/2 batérie (GT806)








Econom CL Equipe (GT810)


Econom CL Equipe Set 1 batéria (GT814)/2 batérie (GT816)

Econom CL Fitter Set 1 batéria (GT834)



B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

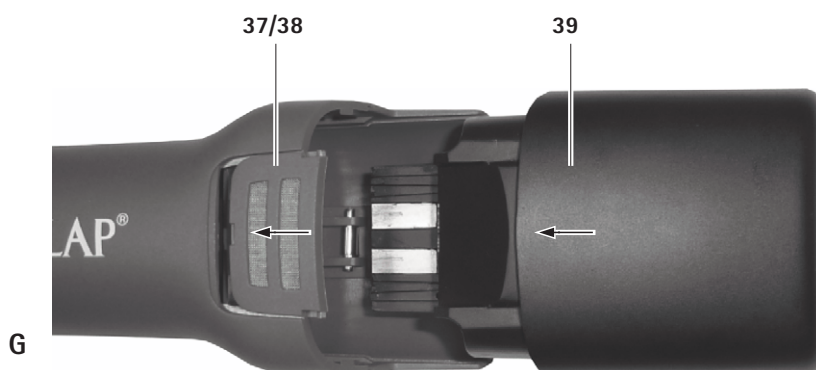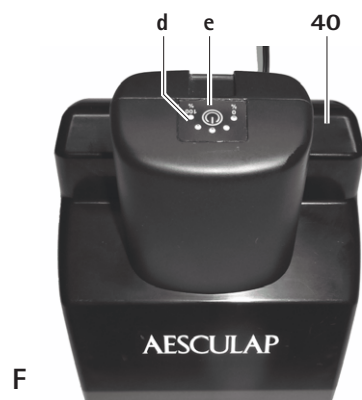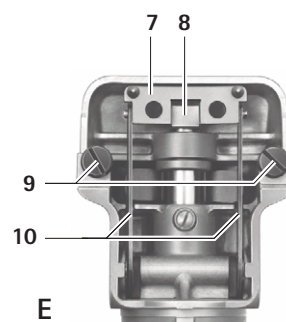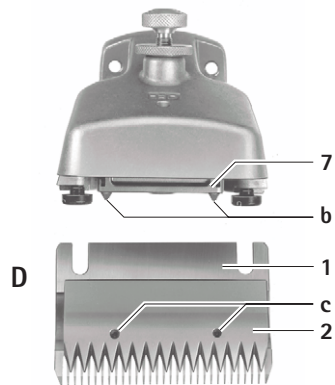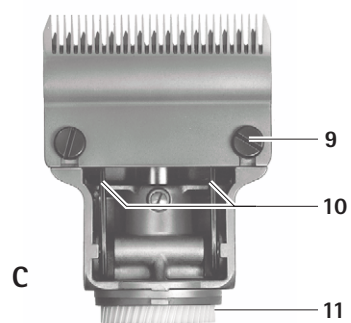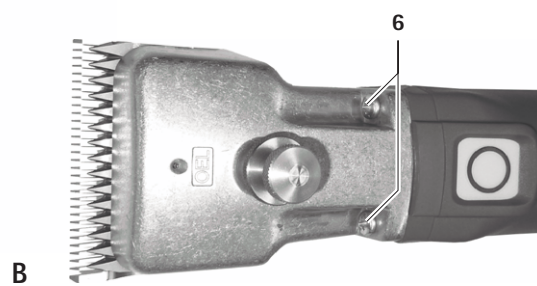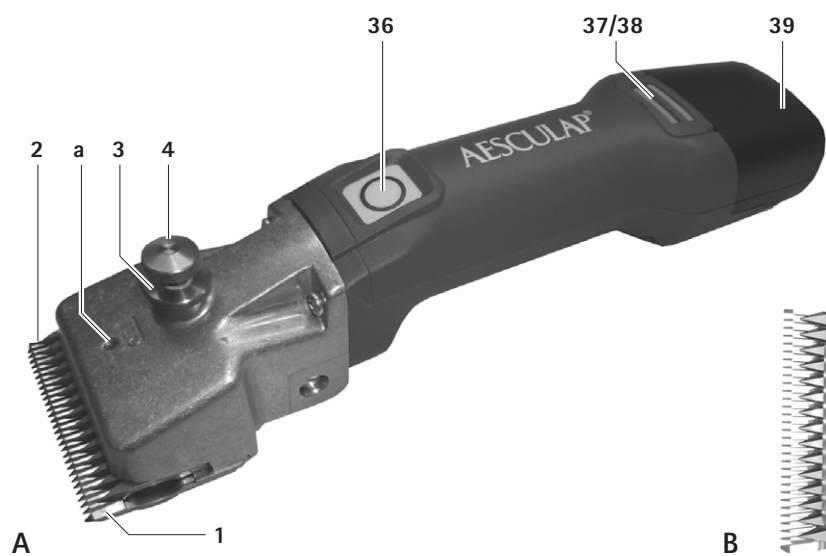

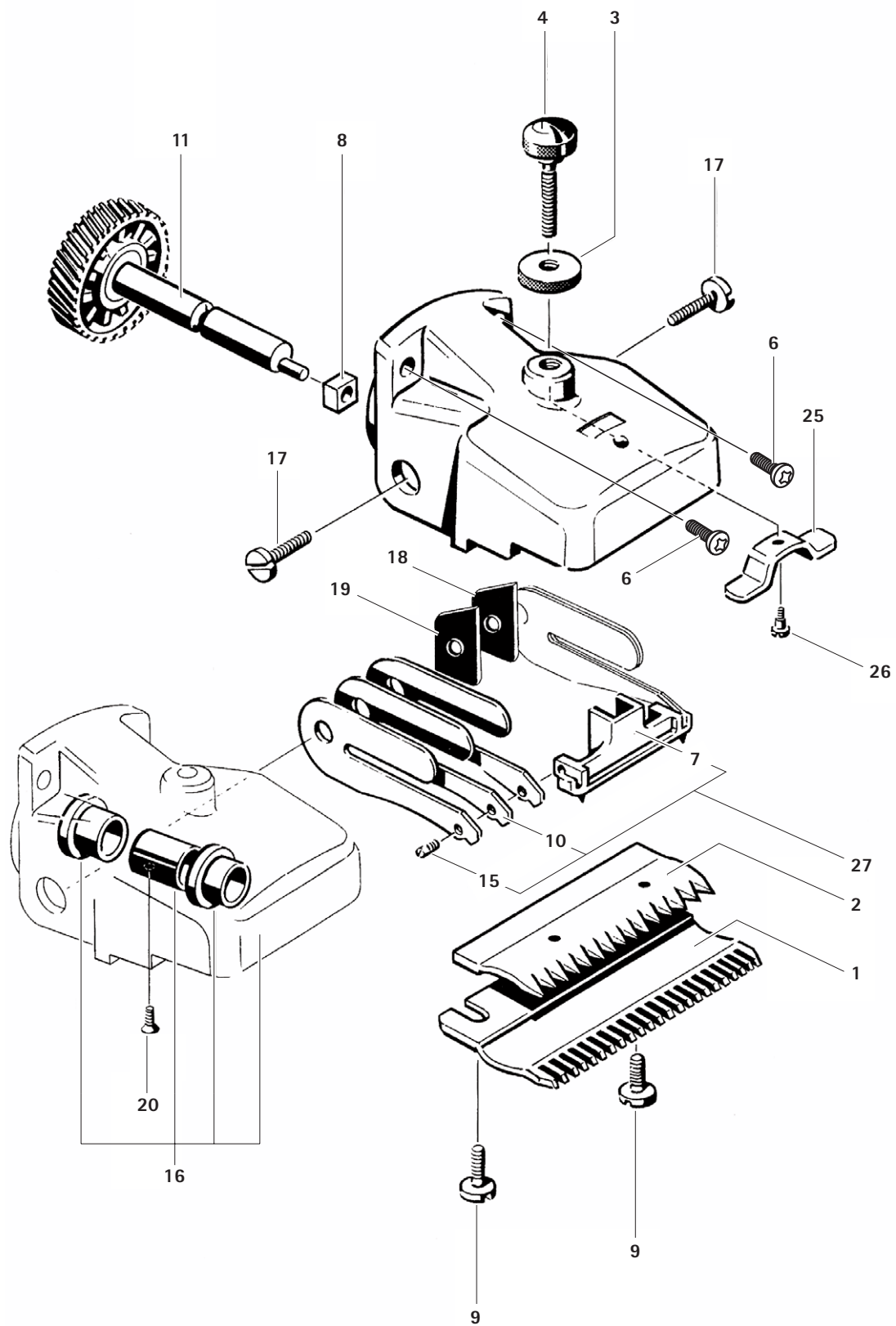



1. Bezpečná manipulácia



Nebezpečenstvo smrti úrazom elektrickým prúdom!

- Výrobok neotvárajte.
- Výrobok pripájajte len k uzemnenému zdroju napájania.

- Pred použitím skontrolujte, či je výrobok v poriadku.
- Nabíjačku a lítium-iónové batérie skladujte pri izbovej teplote.
- Nabíjačku a lítium-iónové batérie uchovávajte v suchu.
- Pred prvým použitím nabite lítium-iónové batérie.
- Aby sa zabránilo poškodeniu spôsobenému nesprávnym nastavením alebo prevádzkou a aby sa neohrozila záruka a zodpovednosť výrobcu:
 - Používajte výrobok len v súlade s týmto návodom na použitie.
 - Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a pokyny na údržbu.
 - Výrobky Aesculap kombinujte len medzi sebou.
- Návod na použitie musí byť používateľovi prístupný.
- Vždy dodržiavajte platné normy.
- Zabezpečte, aby elektrické zariadenia v miestnosti, v ktorej sa zariadenie používa, zodpovedali normám IEC.
- Zariadenie odpojte zo siete vytiahnutím zástrčky, ale nikdy nie vytiahnutím napájacieho kábla.
- Výrobok nepoužívajte v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
- Výrobok nepoužívajte, ak je poškodený alebo chybný. Výrobok odložte, ak je poškodený.

2. Popis produktu

2.1 Balenie obsahuje

Kat.číslo	Označenie
GT800 GT810 GT834	Akumulátorový strihací strojček Econom CL, Econom CL Equipe alebo Econom CL Fitter
GT801	Li-ion batéria
GT803	Nabíjačka
pozri Príslušenstvo/ náhradné diely	Sieťový napájací kábel (so zástrčkou zariadenia)
TA013895	Návod na použitie
GT604	Ručný olejček

2.2 Komponenty potrebné na prevádzku

- Akumulátorový strihací strojček Econom CL/Econom CL Equipe/ Econom CL Fitter
- Nabíjačka
- Sieťový napájací kábel (so zástrčkou zariadenia)
- Li-ion batéria

2.3 Plánované použitie

Akumulátorový strihací strojček Econom CL/Econom CL Equipe/ Econom CL Fitter

Akumulátorový strihací strojček Econom CL/Econom CL Equipe/ Econom CL Fitter sa používa na strihanie veľkých zvierat, ako je dobytok, kone a veľké psy.

Nabíjačka GT803/Li-Ion batéria GT801

Nabíjačka GT803 sa používa na nabíjanie lítium-iónovej batérie GT801.

Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter strojček na strihanie dobytky a koní

2.4 Princíp činnosti

Akumulátorový strihací strojček Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

Akumulátorový strihač Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter sa zapína a vypína pomocou tlačidla zapnutia/vypnutia **36**.

Poznámka

Tlačidlo zapnutia/vypnutia reaguje až po >0,5 s, aby sa zabránilo neúmyselnému zapnutiu alebo vypnutiu stroja.

Nabíjačka GT803/Li-Ion batéria GT801

Nabíjačka GT803 je určená pre sieťové napätie/frekvenciu v rozsahu 100 V až 240 V a 50 Hz až 60 Hz.

Ak chcete nabíjačku GT803 pripraviť na prevádzku, pripojte ju k elektrickej sieti zasunutím sieťovej zástrčky.

Nabíjačka GT803 je vybavená jednou nabíjacou priehradkou.

Nabíjanie sa spustí automaticky hneď po vložení lítium-iónovej batérie do nabíjacej stanice.

Čas nabíjania závisí od stavu nabitia a kapacity Li-ion akumulátora.

Princíp nabíjania

Li-ion batérie sa nabíjajú konštantnými prúdovými impulzmi.

Počas nabíjania sa monitoruje stav nabitia Li-ion batérie. Monitorovanie nabíjacej krivky zabezpečuje úplné nabitie batérie bez prebijania.

Okrem toho sa monitoruje aj teplota batérie a čas nabíjania.

Indikátor stavu nabitia d lítium-iónovej batérie má 5 LED diód. Každá LED dióda znamená 20 % objemu nabitia. Keď sa batéria nabíja, LED príslušného stavu nabíjania bliká. Keď sú všetky LED diódy trvalo rozsvietené, batéria je úplne nabitá.

Čas nabíjania

Nabíjanie sa zastaví hneď po dosiahnutí maximálneho času nabíjania.

Čas nabíjania je približne 70 minút.

3. Príprava

Nedodržanie nasledujúcich pravidiel bude mať za následok úplné vylúčenie zodpovednosti zo strany Aesculap.

- Pri nastavovaní a prevádzke výrobku vždy dodržiavajte nasledujúce pokyny:
 - národné predpisy pre inštaláciu a prevádzku,
 - národné predpisy o ochrane pred požiarom a výbuchom,
 - prevádzkové pokyny podľa predpisov IEC-/VDE.

4. Práca s akumulátorovým strihačom, nabíjačkou a lítium-iónovou batériou

4.1 Nastavenie systému

Pripojenie príslušenstva

Kombinácie príslušenstva, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na použitie, sa môžu používať len vtedy, ak sú osobitne určené na príslušné použitie a ak neohrozujú výkonové a bezpečnostné vlastnosti výrobkov.

4.2 Kontrola funkcií

Akumulátorový strihací strojček Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

- Vykonajte vizuálnu kontrolu.
- Skontrolujte, či je vzduchový filter **37/38** správne umiestnený, pozri obr. G.
- Lítium-iónovú batériu **39** zasuňte do šachty stroja a zaistite ju.
- Skontrolujte, či je batéria nabitá: Stlačte tlačidlo **e**, pozri obr. F.
- Na displeji **d** sa zobrazí stav nabitia.

Poznámka

Aby sa zabránilo vybijaniu lítium-iónovej batérie, keď sa strojček nepoužíva, elektronické spojenie medzi lítium-iónovou batériou a riadiacim systémom strihacieho strojčka poháňaného batériou sa po 1 hodine preruší.

- Opätovná aktivácia lítium-iónovej batérie **39**: Stlačte tlačidlo **e**, pozri obr. F. Rozsvietená sa všetky LED diódy na displeji stavu nabitia **d**.

Nabíjačka/Li-Ion batéria

- Vykonajte vizuálnu kontrolu.
- Pred pripojením výrobku k elektrickej sieti:
 - Skontrolujte, či nie je sieťový kábel poškodený.
 - Skontrolujte výrobok, či nie je poškodený (napr. ohnuté kontakty nabíjacej zásuvky).
 - zapojte sieťový napájací kábel do zásuvky zariadenia nabíjacej stanice.
- Zapojte sieťovú zástrčku do zásuvky sieťového napájania.
- Vložte lítiovo-železnú batériu **39** do nabíjacieho priestoru nabíjacej stanice a nabíjajte ju, pozri obr. F.



4.3 Pripojenie nabíjačky/nabíjanie lítium-iónovej batérie



POZOR

Nebezpečenstvo požiaru v dôsledku skratu pólov batérie kvapalinami alebo kovovými súčasťami!

- Li-ion batéria nie je vložená



POZOR

Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku poškodeného sieťového kábla!

- Pred nabíjaním skontrolujte, či sieťový kábel nie je poškodený.
- Poškodený sieťový napájací kábel nechajte vymeniť u výrobcu.



POZOR

Nebezpečenstvo poranenia a materiálnych škôd v dôsledku poškodenia lítium-iónovej batérie!

- Pred nabíjaním skontrolujte lítium-iónovú batériu, či nie je poškodená.
- Nepoužívajte ani nenabíjajte poškodené lítium-iónové batérie.



Upozornenie

Strata kapacity/výkonu v dôsledku dlhodobého skladovania vybitých lítium-iónových batérií!

- Li-ion batérie skladujte len v plne nabitom stave a uskladnené batérie dobíjajte raz za mesiac.



Upozornenie

Zničenie výrobku, nabíjacieho priestoru alebo lítium-iónovej batérie pri vložení nesprávneho typu batérie do nabíjacieho priestoru!

- Li-ion batériu vkladajte len do príslušnej nabíjacej priehradky.

Poznámka

Nabíjačku môžu používať deti od 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú tieto osoby pod dohľadom alebo boli poučené o tom, ako zariadenie bezpečne používať, a ak rozumejú rizikám spojeným s používaním zariadenia.

- Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.
- Nedovoľte deťom čistiť alebo udržiavať zariadenie bez dozoru.

Poznámka

Li-ion batéria sa počas nabíjania mierne zahrieva.

Poznámka

Ak nabíjačku nebudete používať, odpojte sieťový kábel od sieťovej zásuvky.

- Na nabíjanie lítium-iónových batérií používajte iba nabíjačku Aesculap GT803.
- Pripojenie nabíjačky 40: Zapojte zástrčku zariadenia sieťového kábla do nabíjačky.
- Zástrčku sieťovej zástrčky sieťového napájacieho kábla zapojte do sieťovej zásuvky.
- Zapojte lítium-iónové batérie 39 do nabíjacieho priestoru nabíjačky a nabíjajte ich, pozri obr. F.
LED diódy na displeji stavu nabitia d lítium-iónového akumulátora blikajú v súlade s aktuálnym stavom nabitia. Keď sú všetky LED diódy trvalo rozsvietené, akumulátor je úplne nabitý.

4.4 Výmena lítium-iónovej batérie

- Akumulátorový strihač g držte strihacou hlavou nadol, aby lítium-iónový akumulátor 39 pri uvoľnení nespadol, pozri obr. 1.
- Palcom uvoľnite zámok akumulátora f.



Obr. 1


Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter strojček na strihanie dobytky a koní

- Vyberte lítium-iónovú batériu 39 a vložte nabitú náhradnú lítium-iónovú batériu GT801 do klipovačky s batériou g, pozri obr. 2.



Obr. 2

- Lítium-iónovú batériu 39 zaistíte pomocou zámku batérie f, pozri obr. 3.

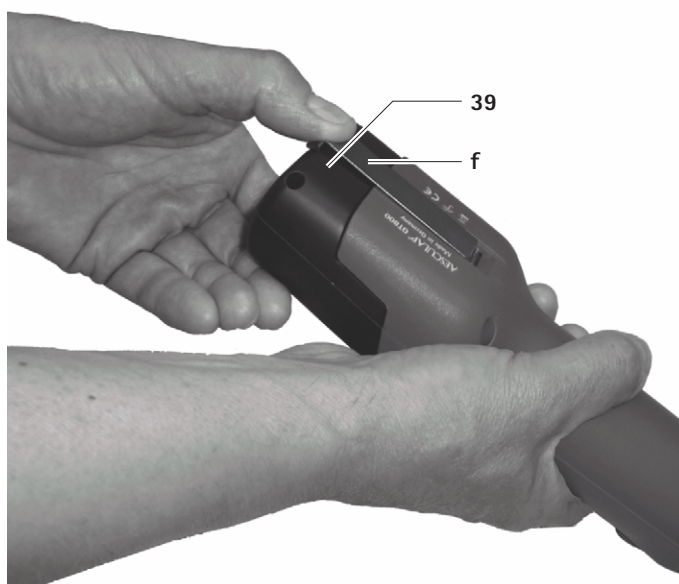

Obr. 3

4.5 Manipulácia s reznou hlavou

Mazanie strihacej hlavy



Poškodenie strihača alebo strihacej hlavy v dôsledku nesprávneho mazania!

- Strihaciu hlavu olejujte len vtedy, keď je stroj v prevádzke
- Nikdy neponárajte strihaciu hlavu do akejkoľvek kvapaliny!
- Používajte iba ľahký mazací olej GT604.

- Pred strihaním každého zvieraťa dôkladne naolejujte strihaciu hlavu v mazacom bode a, pozri obr. A.
- Pružinové listy 10 namažte 2 až 3-krát denne 3 až 4 kvapkami oleja, pozri obr. C.

Mazanie ozubeného kolesa



Poškodenie strihacieho zariadenia alebo ozubeného kolesa v dôsledku nesprávneho mazania!

- Používajte iba mazivo na prevodovky GT605.
- Počas strihacej sezóny namažte ozubené koleso 1 až 2-krát.

- Odomknutie a vybratie lítium-iónovej batérie 39.
- Odskrutkujte obe skrutky 6, pozri obr. B.
- Potom veľmi mierne (asi o 15°) otočte reznú hlavu proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ju z plášťa motora.
- Na dva protilahlé body ozubeného kolesa 11 naneste približne 1 cm maziwa, pozri obr. C.
- Opatrne nasadte reznú hlavu na motor. Pri opätovnom nasadzovaní reznej hlavy dbajte na to, aby bola otočená o 15° proti smeru hodinových ručičiek tak, aby jej spodná príruha zapadla do drážky krytu motora.

Výmena reznej dosky

- Odomknutie a vybratie lítium-iónovej batérie 39.
- Uvoľnite uzáver 3 a nastavovaciu skrutku 4 približne o 2 otáčky, pozri obr.
- Uvoľnite obidve upínacie skrutky 9, stiahnite reznú dosku 1 dopredu a vyberte hornú reznú dosku 2, pozri obr. D a obr. E.
- Pred nasadením hornej reznej dosky 2 sa uistite, že oscilačný blok 8 je v určenej priehlbine oscilátora 7, pozri obr. E.
- Vložte hornú reznú dosku 2. Pritom dbajte na to, aby oba hroty b oscilátora 7 presne zapadli do otvorov c hornej reznej dosky 2, pozri obr. D.



- Zatlačte spodnú reznú dosku **1** pod hlavy upínacích skrutiek **9** až na plášť reznej hlavy a pevne zaskrutkujte obe upínacie skrutky **9**.
- Uťahnite nastavovaciu skrutku **4**, až kým sa obidve rezné dosky nebudú mierne tlačiť k sebe, pozri obr.

Nastavenie prítlaču platničiek

Poznámka

Prítlak na dosku sa musí nastavovať za chodu stroja a bez pomocných nástrojov.

Poznámka

Ak je tlak na reznú dosku príliš vysoký, dochádza k nahromadeniu tepla a väčšiemu opotrebovaniu rezných dosiek.

- Opatrne uvoľnite poistný uzáver **3** a nastavovaciu skrutku **4**, až kým horná žacia doska **2** nebude tlačiť na spodnú žaciu dosku **1** (zvuk motora sa výrazne zvýši), pozri obr. A.
- Nastavovaciu skrutku **4** skrutkujte dovtedy, kým nepocítite mierny odpor. Od tohto bodu pokračujte v otáčaní približne o jedno celé slnko a potom dotiahnite poistný uzáver **3**.

Čistenie reznej hlavy

- Strihacia hlava sa musí čistiť minimálne po každom dni strihania alebo ak sa znečistí.
- Odomknutie a vybratie lítium-iónovej batérie **39**.
- Odskrutkujte obe skrutky **6**, pozri obr.
- Potom veľmi mierne otočte strihaciu hlavu (asi o 15°) proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ju z plášťa motora.
- Odstráňte rezné dosky, pozrite si časť Výmena reznej dosky.
- Vnútornú časť a jednotlivé časti reznej hlavy dôkladne očistite pomocou kefký.
- Vložte reznú dosku a utiahnite ju, pozri Výmena reznej dosky.
- Premažte ozubené koleso, pozrite si časť Mazanie ozubeného kolesa.
- Opatrne nasadte reznú hlavu na motor. Pri opätovnom nasadzovaní reznej hlavy dbajte na to, aby bola otočená o 15° proti smeru hodinových ručičiek tak, aby jej spodná príruha zapadla do drážky krytu motora.
- Namažte reznú hlavu, pozrite si časť Mazanie reznej hlavy.

Čistenie vzduchového filtra

- Vzduchový filter **37/38** čistite aspoň raz denne alebo ak sa znečistí.
- Odstráňte vzduchový filter **37/38** z akumulátorového strihača, pozri obr.
- Vzduchový filter **37/38** dôkladne vyčistite v teplej vode pomocou kefký.
- Nechajte vzduchový filter **37/38** vyschnúť.
- Vyčistite strihací strojček napájaný z batérie.
- Vzduchový filter **37/38** nasadte na zastrešovač poháňaný batériou.

Opätovne nabrúste rezné dosky.

- Za účelom opätovného naostrenia rezných dosiek sa obráťte na technický servis, pozri časť Technický servis.

4.6 Skladovanie

- Pred uskladnením strihací strojček a strihacie dosky dôkladne vyčistite, pozri časť Opätovné spracovanie.
- Strihací strojček skladujte v suchej, tmavej a čistej miestnosti.

5. Rezné dosky

5.1 Rezné dosky kompatibilné s reznou hlavou GT367

Kat.č.	Označenie
GT501	Horná rezná doska s 15 reznými zubami
GT502	Spodná rezná doska s 31 reznými zubami, výška rezu: 3 mm
GT503	Horná rezná doska so 17 reznými zubami
GT504	Spodná rezná doska s 18 reznými zubami, výška rezu: 3 mm
GT505	Horná rezná doska s 23 reznými zubami
GT506	Spodná rezná doska s 23 reznými zubami, výška rezu: 3 mm
GT508	Spodná rezná doska s 51 reznými zubami, výška rezu: 1 mm
GT510	ako GT506, ale s výškou rezu 5 mm
GT511	ako GT502, ale s výškou rezu 1 mm

5.2 Odporúčané kombinácie

Kombinácia	Horná/dolná doska	Vhodné pre
tesne vzdialené zuby	GT501/GT502	Hovädzí dobytok a kone (bežné vybavenie pre GT474 a GT367)
	GT501/GT511	Priemyselné strihanie
	GT505/GT508	(napr. strihanie srsti)
stredne vzdialené zuby	GT505/GT506	Hovädzí dobytok, psy a kozy
	GT505/GT510	Psy a kozy
široko rozmiestnené zuby	GT503/GT504	Hovädzí dobytok, ovce s jemnou vlnou a slobodné ovce

Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter strojček na strihanie dobytky a koní

6. Spracovanie

6.1 Čistenie/dezinfekcia



Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a požiaru!

- Pred čistením:
 - Odpojte sieťovú zástrčku od nabíjačky.
 - Odblokujte lítium-iónovú batériu a vyberte ju z akumulátorového zastrihávača.
- Nepoužívajte horľavé alebo výbušné čistiace alebo dezinfekčné roztoky.
- Zabezpečte, aby do výrobku neprenikli žiadne kvapaliny.



Upozornenie

Poškodenie alebo zničenie výrobku spôsobené mechanickým čistením/dezinfekciou!

- Výrobok čistite a dezinfikujte iba ručne.
- Výrobok v žiadnom prípade nesterilizujte.



Upozornenie

Riziko poškodenia výrobku v dôsledku použitia nevhodných čistiacich/dezinfekčných prostriedkov!

- Používajte len čistiace/dezinfekčné prostriedky schválené na čistenie povrchov. Dodržiavajte pokyny výrobcu príslušného čistiaceho/dezinfekčného prostriedku.
- Výrobok nikdy neponárajte do vody alebo čistiaceho prostriedku.
- Do nabíjacích priestorov nevypúšťajte žiadne tekutiny.
- Kontakty v nabíjacej priehradke čistite mimoriadne opatrne.

- Plášť výrobku utrite handričkou bez chlpkov navlhčenou komerčným dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu utieraním.
- V prípade potreby po uplynutí primeraného času pôsobenia utrite všetky zvyšky čistiaceho/dezinfekčného prostriedku handričkou bez chlpkov navlhčenou čistou vodou.
- Výrobok osušte čistou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.
- Kontakty v nabíjacom priestore očistite izopropanolom alebo etylalkoholom a vatovým tampónom. Nepoužívajte korozívne chemikálie.
- V prípade potreby proces čistenia/dezinfekcie zopakujte.

6.2 Kontrola a overovanie

- Nechajte výrobok vychladnúť na izbovú teplotu.
- Po každom čistiacom a dezinfekčnom cykle skontrolujte, či je výrobok: čistý, funkčný a nepoškodený.
- Skontrolujte, či výrobok nie je poškodený, či neprodukuje neobvyklý hluk pri chode, či sa neprehrieva alebo či nadmerne nevibruje.
- Skontrolujte, či strihacia hlava nie je zlomená, poškodená alebo či nemá tupé rezné hrany.
- Ak je výrobok poškodený, odložte ho.

7. Údržba

Na zabezpečenie spoľahlivej prevádzky Aesculap odporúča vykonávať servis výrobku **aspoň raz ročne**.



8. Riešenie problémov

8.1 Akumulátorový strihací strojček Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

Porucha	Detekcia	Príčina	Náprava
Zastrihávač napájaný z batérie sa nespustí	–	Li-ion batéria nie je aktivovaná	Stlačte tlačidlo e na lítium-iónovej batérii
	LED dióda tlačidla zapnutia/vypnutia 36 blikne dvakrát za sekundu	Li-ion batéria nie je nabitá	Zaťaženie lítium-iónovej batérie
	–	Porucha lítium-iónovej batérie	Vložte novú lítium-iónovú batériu
	–	Li-ion batéria nie je vložená	Vložte lítium-iónovú batériu
Akumulátorový strihač sa počas prevádzky pozastaví	–	Li-ion batéria deaktivovaná prostredníctvom ochranného obvodu	Vypnutie a opätovné zapnutie zastrihávača napájaného z batérie
	–	Li-ion batéria je vybitá	Vložte novú lítium-iónovú batériu

Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter strojček na strihanie dobytky a koní

8.2 Nabíjačka a lítium-iónová batéria

Porucha	Detekcia	Príčina	Náprava
Nabíjačka nefunguje	Indikátor LED "Batéria" sa nerozsvieti	Sieťový napájací kábel nie je zapojený	Zapojte sieťový kábel do zásuvky zariadenia na nabíjačke a do zásuvky sieťového napájania.
	Li-ion batéria nie je nabitá	Poškodený sieťový napájací kábel	Vymeňte sieťový napájací kábel
		Porucha lítium-iónovej batérie	Pošlite lítium-iónovú batériu výrobcovi na opravu, pozrite si Technický servis
Li-ion batériu nie je možné nabiť	Li-ion batéria je pripojená, indikátor stavu nabitia sa nerozsvieti	Znečistené kontakty nabíjačky	Vyčistite kontakty v nabíjacom priestore, pozrite si časť Opätovné spracovanie
	–	Poškodené kontakty nabíjačky	Pošlite nabíjačku výrobcovi na opravu, pozri časť Technický servis
	–	Porucha lítium-iónovej batérie	Pošlite lítium-iónovú batériu výrobcovi na opravu, pozrite si Technický servis
	–	Chybná nabíjačka	Pošlite nabíjačku výrobcovi na opravu, pozri časť Technický servis
	–	Počas nabíjania sa v lítium-iónovej batérii namerala príliš vysoká teplota	Vyberte lítium-iónovú batériu z nabíjacieho priestoru, nechajte ju vychladnúť a zopakujte proces nabíjania
			Ak sa problém opakuje: Pošlite lítium-iónovú batériu výrobcovi na opravu, pozri časť Technický servis
	–	Chyba nabíjania batérie alebo porucha lítium-iónovej batérie	Vyberte lítium-iónovú batériu z nabíjacieho priestoru a zopakujte proces nabíjania
			Ak sa problém opakuje: Pošlite lítium-iónovú batériu výrobcovi na opravu, pozri časť Technický servis



9. Technické služby



POZOR

Riziko poranenia a/alebo poruchy!

➤ **Výrobok neupravujte.**

Úpravy vykonané na zdravotníckom technickom zariadení môžu mať za následok stratu záručných práv a stratu platných licencií.

Servisné adresy

VETIS Kráľovičové Kračany

Centrálny sklad a sídlo firmy
930 03 Kráľovičové Kračany 91
Tel.: 031/ 55 14 112

Mob: 0918/ 514 112

E-mail: vetis@vetis.sk

10. Príslušenstvo/náhradné diely

Ostatné adresy služieb môžete získať na vyššie uvedenej adrese.

Kat.číslo	Označenie	Dizajn	Napájací kábel alebo napájacia jednotka	Li-ion batéria	Kompletná nabíjacia stanica	Príslušenstvo
GT804/ GT806	Econom CL	Európa mimo Veľkej Británie	TA012170 Európska zástrčka, čierna L=1,8 m	GT801	GT803	GT604 Špeciálny mazací olej pre rezné dosky a reznú hlavu
GT814/ GT816	Econom CL Equipe					
GT834	Econom CL Fitter					
GT804G/ GT806G	Econom CL	Veľká Británia	TA012169 Zástrčka GB, čierna, L=1,8 m			GT605 Mazivo na ozubené kolesá (tuba)
GT814G/ GT816G	Econom CL Equipe					
GT834G	Econom CL Fitter					
GT804K/ GT806K	Econom CL	USA	TA012168 2-kolíkový konektor, čierny, L=1,8 m			
GT814K/ GT816K	Econom CL Equipe					
GT834K	Econom CL Fitter					
GT804A/ GT806A	Econom CL	Austrália	TA013657 2-kolíkový konektor, čierny, L=1,8 m			
GT814A/ GT816A	Econom CL Equipe					
GT834A	Econom CL Fitter					

Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter strojček na strihanie dobytky a koní

11. Technické údaje

11.1 Akumulátorový strihací strojček Econom CL/
Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

	GT800 Econom CL	GT810 Econom CL Equipe	GT834 Econom CL Fitter
Frekvencia	max. 2 750 1/min	max. 2 250 1/min	max. 3 000 1/min
Čas prevádzky s lítium-iónovou batériou	približne. 70 min	približne. 80 min	približne. 70 min
Menovité napätie	max. 21.6 V	max. 21.6 V	max. 21.6 V
Kapacita	max. 2.6 A	max. 2.6 A	max. 2.6 A
Hmotnosť (so strihacou hlavou a batériou)	1 250 g	1 250 g	1 250 g
Značky kvality	TÜV-GS, CE, UL, CSA	TÜV-GS, CE, UL, CSA	CE, UL, CSA

11.2 Nabíjačka

	GT803
Rozsah napätia (spotreba prúdu)	100 V to 240 V
Frekvencia	50 Hz to 60 Hz
Nabíjacie napätie/výstupné napätie	max. 25.2 V
Nabíjací prúd/výstupný prúd	max. 2.6 A
Hmotnosť (s káblom a napájacou jednotkou)	764 g
Značky kvality	TÜV-GS, CE, UL, CSA

11.3 Li-ion batéria

	GT801
Typ buniek	Li
Menovité napätie	21.6 V
Kapacita	2.6 Ah
Doba nabíjania	približne. 70 min
Značky kvality	TÜV-GS, CE, UL, CSA

11.4 Vyhlásenie o zhode



Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tento výrobok je v súlade s nasledujúcimi normami a regulačnými dokumentmi:

2004/108/ES Pokyny pre EMC:

DIN EN 60335-1

DIN EN 60335-2-8

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a podobných zariadení

- Všeobecné požiadavky
- pre strojčeky na strihanie vlasov Aesculap Suhl GmbH

12. Likvidácia

Elektrické náradie, príslušenstvo a obaly by sa mali odovzdať na ekologickú recykláciu.

12.1 Iba pre krajiny EÚ



Elektrické náradie nevyhadzujte do domáceho odpadu! Podľa európskej smernice 2012/19/EÚ o starých elektrických a elektronických spotrebičoch a jej implementácie do vnútroštátnych právnych predpisov sa elektrické náradie, ktoré už nie je vhodné na použitie, musí zbierať oddelene a odovzdať na ekologickú recykláciu.

12.2 Li-Ion batéria

Lítium-iónové batérie nevyhadzujte do domáceho odpadu, ohňa alebo vody. Chybné alebo použité lítium-iónové batérie sa musia zbierať, recyklovať alebo likvidovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu v súlade so smernicou 2006/66/ES.



13. Dvojročná záruka

Vážený zákazník,

ďakujeme, že ste si vybrali jeden z našich výrobkov.

Už desaťročia je meno Aesculap symbolom overenej kvality a prvotriednych služieb. Sme známi tým, že našim zákazníkom poskytujeme inovatívne, vysoko výkonné výrobky. Spoločnosť Aesculap vyrába vysokokvalitné zariadenia a môže vás ubezpečiť, že používa vysokokvalitné materiály a starostlivé výrobné procesy. Chceli by sme vás upozorniť, že nenesieme zodpovednosť za chyby našich výrobkov, ak sú spôsobené nesprávnym používaním, bežným opotrebovaním alebo sú spôsobené nesprávnym používaním výrobku, prípadne použitím nevhodných alebo nesprávne fungujúcich výrobkov tretích strán.

Časti, ktoré zvyčajne podliehajú opotrebovaniu, a za ktoré preto nenesieme zodpovednosť, sú batéria a strihacia hlava. Z našej záruky sú vylúčené aj materiálové chyby, ktoré nemajú vplyv alebo len zanedbateľne ovplyvňujú hodnotu alebo funkciu výrobku.

Ak sme zodpovední v rámci našej záruky, vyhradzuje si právo na opravu alebo výmenu výrobku.



AESCULAP®

VETIS Královičové Kračany

Centrálny sklad a sídlo firmy
930 03 Královičové Kračany 91
Tel.: 031/ 55 14 112

Mob: 0918/ 514 112

E-mail: vetis@vetis.sk

