

CLIPSTER

OnyX

#18180

- Ⓚ Návod na použitie
- Ⓜ Kezelési útmutató



Návod na použitie

1. Bezpečnosť

Pred použitím strihača si pozorne prečítajte návod na použitie, najmä časť "Bezpečnosť".

Pomôže vám to vyhnúť sa možným nebezpečenstvám a ochráni vás to pred poškodením zariadenia v dôsledku nesprávneho používania. Návod na použitie si uschovajte pre budúce použitie. Ak zariadenie odovzdáte novému majiteľovi, odovzdajte mu aj tento návod na použitie.

1.1 Vysvetlenie pojmov a symbolov

V tomto návode na použitie sa používajú nasledujúce pojmy:



Ak sa nerešpektuje, môže to viesť k vážnym zraneniam alebo smrti

Nebezpečenstvo



Pozor

Ak sa nerešpektuje, môže to viesť k vážnym zraneniam (alebo smrti).

Poznámka

Informácie, ktoré je potrebné dodržiavať pri manipulácii so zariadením.



Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Prístroj sa nesmie nabíjať ani prevádzkovať vo vani, sprche, nad naplneným umývadlom/inou nádobou.

1.2 Plánované použitie

- nožnice sa používajú na zastrihávanie srsti
- zariadenie je určené len na použitie v interiéri. Nemal by sa používať vo vonkajšom prostredí (záhrada, terasa atď.).
- ak sa zariadenie používa spôsobom, ktorý nie je v súlade s určeným použitím, a/alebo ak sa na zariadení vykonávajú úpravy, zaniká tým záruka a zodpovednosť výrobcu



1.3 Dôležité upozornenia na nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo

- zariadenie, nabíjacia stanica a pripojovací kábel uchováajte mimo dosahu vlhkosti, vody a iných kvapalín a nepoužívajte ho mokрыmi rukami.
- neponárajte zariadenie, nabíjaciú stanicu a pripojovací kábel pod vodu ani ich neoplachujte pod tečúcou vodou
- ak zariadenie spadne do vody, nesmie sa potom už používať
- integrácia prúdového chrániča s menovitým vypínacím prúdom menším ako 30 mA do inštalácie budovy poskytuje dodatočnú ochranu. Odporúčame vám, aby ste požiadali svojho elektrikára o inštaláciu prúdového chrániča pre vaše elektrické obvody.
- zariadenie sa musí odpojiť od elektrickej siete, keď je batéria nabitá alebo po uplynutí najmenej 8 hodín čistého času nabíjania
- ak sa batéria po 8 hodinách úplne nenabije, zariadenie nepoužívajte a kontaktujte výrobcu



Pozor

Strihacia hlava sa môže po dlhšom používaní zahriať!



Nebezpečenstvo

Strihač sa môže prevádzkovať len s napájacím akumulátorom, ktorý spĺňa špecifikácie uvedené na výrobnom štítku. Zariadenie sa môže prevádzkovať len s napájacím zdrojom, ktorý dodáva výstupné napätie SELV uvedené na označení zariadenia.

1.4 Všeobecné bezpečnostné pokyny



Nebezpečenstvo

Zariadenie nikdy nepoužívajte, ak:

- zariadenie, nabíjacia stanica alebo pripojovací kábel je poškodený
- strihacia hlava je poškodená alebo naštiepená, pretože môže poraniť pokožku
- zariadenie spadlo, vykazuje viditeľné poškodenie alebo je narušená jeho funkčnosť
- zariadenie je poškodené tak, že sú odhalené elektrické komponenty

V každom prípade sa zariadenie musí okamžite odpojiť od elektrickej siete!

Túto pomôcku môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby, ktoré na to nemajú dostatočné skúsenosti a vedomosti, ak sú pod dohľadom alebo boli vyškolené o bezpečnom používaní pomôcky a rozumejú základným rizikám. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- deti by mali byť neustále pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať. Dbajte na to, aby sa deti o klipovú hlavicu nezranili. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí.
- udržiajte mimo dosahu detí aj obalový materiál, napr. fólie.
- pripojovací kábel položte tak, aby oň nikto nemohol zakopnúť alebo naň stúpiť
- chráňte pripojovací kábel pred poškodením. Nikdy neťahajte za pripojovací kábel. Pripojovací kábel vždy vytiahnite zo zásuvky uchopením za zástrčku napájacieho adaptéra. Kábel udržiavajte mimo horúcich povrchov. Pripojovací kábel pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený.
- nikdy nevystavujte zariadenie dlhodobým teplotám pod 0 °C alebo nad +40 °C. Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu.
- opravy smie vykonávať len oprávnený personál, aby sa predišlo nebezpečenstvu
- na účely údržby a výmeny dielov odpojte zariadenie od napájania
- strihacia hlava sa nesmie rozoberať

1.5 Bezpečnosť počas prevádzky



Nikdy sa nedotýkajte strihacej hlavy ani do nej nesiahajte, keď je zariadenie zapnuté.

Nebezpečenstvo

Strihacia hlava sa musí pravidelne čistiť a namazať na príslušných miestach, aby sa zabezpečila bezproblémová prevádzka.

Zariadenie sa musí vypnúť, keď:

- keď zariadenie odložíte, napr. na nabíjanie alebo keď na krátky čas prerušíte strihanie.
- nasadíte alebo odoberte hrebeňový nástavec
- čistíte alebo olejujete zariadenie

Strihač používajte len s originálnym príslušenstvom (nabíjacia stanica, hrebeňový nástavec atď.).

Nikdy nepoužívajte ostré predmety (napr. hrebeň na chvost) na odstránenie prachu alebo cudzích predmetov z vnútra zariadenia.

2. Nabíjanie

- keď je zariadenie dodané, nie je ešte pripravené na prevádzku
- pred pripojením strihača do zásuvky sa uistite, že napätie v sieti zodpovedá napätiu uvedenému na výrobnom štítku napájacieho súboru
- v záujme zachovania kapacity nabitia akumulátora odporúčame, aby ste akumulátor občas vybíjali prevádzkou zariadenia, kým sa motor nezastaví
- pred prvým použitím zariadenie nabíjajte celých 8 hodín, aby sa aktivovala dodaná nabíjateľná batéria
- nenabíjajte zariadenie pri teplotách nižších ako 0 °C alebo vyšších ako 40 °C
- nenabíjajte zariadenie, ak je vystavené priamemu slnečnému žiareniu alebo teplu radiátora
- štandardný čas nabíjania je 300 minút. Vyhnite sa dlhšiemu času nabíjania, aby ste zabránili poškodeniu batérie.
- keď je zariadenie úplne nabité, možno ho používať dlhšie ako 90 minút. Počas nabíjania svieti červená kontrolka.
- strihač je možné pripojiť priamo k zdroju napájania pomocou napájacieho akumulátora alebo nabíjať pomocou nabíjacej stanice alebo napájacieho akumulátora

3. Rozsah dodávky



1 Strojček

2 Hrebeň (3 mm)

3 Hrebeň (6 mm)

4 Hrebeň (9 mm)

5 Hrebeň (12 mm)

6 Čistiaca kefa

7 Olejček

8 Napájačka


9 Nabíjacia stanica

4. Prevádzka, čistenie a starostlivosť

Zapnutie a vypnutie:

Posunutím prepínača zapnutia/vypnutia dopredu zariadenie zapnete. Posunutím vypínača dozadu zariadenie vypnete (obr. 1).

Tento strihač je možné používať prostredníctvom jeho kábla, ako aj bez kábla. Pripojte napájací adaptér do zásuvky zariadenia, ktorá sa nachádza na spodnej strane zariadenia. Potom pripojte napájací blok k napájaniu (obr. 2). Nabíjací zásobník sa môže používať aj s napájacím balíkom (obr. 3).

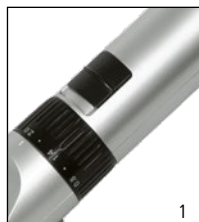

Nastavenie výšky strihu:

Strihače majú 5-stupňové nastavenie výšky strihu (0,8 - 2,0 mm). Výšku strihania môžete meniť otáčaním nastavovacieho kolieska (obr. 4).



Používanie príslušenstva hrebeňa:

Uistite sa, že je strihač pri inštalácii a demontáži hrebeňa vypnutý. K dispozícii sú štyri hrebene (3, 6, 9, 12 mm) na rôzne dĺžky strihu. Nasadíte hrebeň na strihaciu hlavu a uistíte sa, že zapadá na strane.

Zariadenie pravidelne čistite a olejujte, aby ste zabezpečili bezproblémovú funkciu a plný funkčný výkon strihačov.

Čistenie strihacej hlavy:

Strihacia hlava by sa mala pri pravidelnom používaní raz denne dôkladne vyčistiť.

Vypnite zariadenie. Odpojte zariadenie od napájania. Odstráňte hrebeňový nástavec a stlačením v strede strihacích nožov ich vyberte (obr. 5). Odstráňte chlpy pomocou čistiacej kefky.

Nasadíte strihaciu hlavu späť na strihací nástavec, ako je znázornené na obr. 6. Uistite sa, že je zaistovací mechanizmus správne umiestnený, a zatlačte strihaciu hlavu na zariadenie, kým nezapadne.



Olejovanie strihacej hlavy:

Strihacia hlava musí byť naolejovaná, aby sa zabezpečili dobré výsledky strihania čo najdlhšie (počas prevádzky každých 15 minút a pri skladovaní najlepšie denne).

Odstráňte hrebeňový nástavec. Pomocou kefy vyčistite reznú hranu a odstráňte srsti/vlasy medzi čepeľami. Miesta, kde sa dotýka horná a dolná časť strihacej hlavy, naolejajte. Zariadenie je potrebné naolejovať okamžite, keď sa strihací výkon výrazne zníži alebo sa zdá, že teplota strihacej hlavy je príliš vysoká. Strihacia hlava by sa mala naolejovať raz denne, keď sa strihacie strojčeky nepoužívajú.

Výmena strihacej hlavy:

Strihacia hlava je opotrebovávaná časť. Napriek dobrej starostlivosti sa výkon strihania zníži. V tomto okamihu by sa mala strihacia hlava vymeniť. Strihacia hlava sa dá objednať samostatne ako náhradný diel (ref. č. 18181). Pri výmene strihacej hlavy môžete odstrániť zvyšky vlasov vo vnútri strihača pomocou kefy. Stlačením v strede strihacích nožov ich odstráňte (obr. 7). Nasadte novú strihaciu hlavu späť na strihač, ako je znázornené na obr. 8. Uistite sa, že je zaistovací mechanizmus správne umiestnený, a zatlačte strihaciu hlavu na zariadenie, kým nezapadne.

Čistenie zariadenia:

Zariadenie občas utrite vlhkou handričkou a potom ho osušte.

5. Riešenie problémov

Čo robiť, keď...

... sa zariadenie nedá zapnúť?

- je batéria vybitá? Pripojte napájací akumulátor a nabite zastrihávač
- je strihacia hlava suchá? Strihacia hlava musí byť naolejovaná

... strihacia hlava nepracuje hladko?

- strihacia hlava musí byť naolejovaná
- horné a dolné nože sa môžu pri dlhšom nepoužívaní zaseknúť

... sa pri nabíjaní nerozsvieti displej nabíjania?

- skontrolujte, či je napájací blok správne pripojený

... zariadenie sa samo vypne?

- batéria je vybitá. Nabíjanie zastrihávačov

... batériu už nemožno nabíjať?

- batéria alebo napájací blok je poškodený. Napájací blok je možné doobjednať. Ak je batéria chybná, zariadenie sa musí riadne zlikvidovať.

6. Technické údaje

	Strojček	Napájacia súprava
Kat. číslo	18180	18182
Rýchlosť motora	6900 rpm	-
Čas nabíjania	300 min	-
Čas strihu	90 min	-
Hmotnosť	212 g	277 g
Vstupné napätie	3V DC	220-240 V
Frekvencia	-	50 Hz
Kapacita batérie	1200 mAh	-
Proces nabíjania/používania pri teplote okolia	0°C - 40 °C	0°C - 40 °C
Trieda ochrany	III	II



Elektronický odpad

Za likvidáciu tohto zariadenia po skončení jeho životnosti je zodpovedný prevádzkovateľ. Prečítajte si platné vnútroštátne predpisy. Zariadenie sa nesmie likvidovať v domácom odpade. V súlade s ustanoveniami smernice EÚ o likvidácii elektrických a elektronických zariadení je možné zariadenie bezplatne zlikvidovať v miestnom zbernom alebo recyklačnom stredisku. Prípadne ho môžete odovzdať predajcom, ktorí ponúkajú službu zberu. Správna likvidácia pomáha zabezpečiť ochranu životného prostredia a zabraňuje akýmkoľvek nepriaznivým účinkom na ľudské zdravie a životné prostredie.



Symbol CE / vyhlásenie o zhode CE

Spoločnosť VETIS s.r.o. týmto vyhlasuje, že výrobok/zariadenie opísané v tomto návode na použitie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia a predpisy. Označenie CE potvrdzuje zhodu so smernicami Európskej únie.

1. Biztonság

Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati utasítást; különösen a Biztonság című fejezetet, mielőtt a nyírógépet üzembe helyezi. Ezzel védi saját magát a lehetséges veszélytől, a készüléket pedig a hibás kezelés okozta károktól. Órizza meg a használati utasítást későbbi használatra is. A készülék továbbadásakor adja át a használati utasítást is.

1.1 Kifejezések és szimbólumok magyarázata

A használati utasítás a következő fogalmakat használja:



VESZÉLY

Figyelmetlenül való kezelés súlyos, akár halálos kimenetelű sérülést okoz



FIGYELMEZTETÉS

Figyelmetlenül való kezelés súlyos (vagy halálos kimenetelű) sérülést okozhat

Utasítás

A készülék kezelésekor kötelezően betartandó utasítások.



Áramütés veszélye! Az eszközt soha sem szabad fürdőkádban, zuhanyzóban, vízzel teli mosdókagyló / más edény felett tölteni vagy üzemeltetni.

1.2 Rendeltetésszerű használat

VESZÉLY

- a nyírógép állatszór/bunda vágására használható.
- a készülék csak beltéri használatra alkalmas! Ne üzemeltesse kültérben (kertben, teraszon stb.)!
- a rendeltetésszerű használatától eltérő alkalmazás és a készülék módosítása miatt megszűnik a gyártó garanciális és jótállási kötelezettsége

1.3 Veszéllyel kapcsolatos fontos utasítások

- tartsa távol a készüléket, a töltőállomást és a csatlakozókábelt nedvességtől, víztől és más folyadéktól és ne kezelje nedves kézzel
- ne merítse vízbe és ne mossa folyó vízzel a készüléket, a töltőállomást és a csatlakozókábelt



VESZÉLY

- ha a készülék vízbe esett, nem szabad tovább használni
- további védelmet biztosít a 30 mA-nél kisebb névleges kioldóáramú hibaáram-védőeszköz beszerelése az épület elektromos rendszerébe. Javasoljuk, hogy az áramköröket a villanyszerelő FI védőkapcsolóval védje
- ha az akkumulátor feltöltött vagy legkésőbb 8 óra töltésidő után a készüléket le kell választani az ellátófeszültségről
- ha az akkumulátor 8 óra alatt sem tölt fel teljesen, ne használja tovább az eszközt és forduljon a gyártóhoz



FIGYELMEZTETÉS

Hosszabb használat után a nyírófej felforrósodhat!



VESZÉLY

A nyírógépet csak az adattáblán megadottak szerinti tápegységgel szabad üzemeltetni. A készüléket csak olyan tápegységgel szabad üzemeltetni, amely SELV kimeneti feszültséget szolgáltat a készüléken található jelölésnek megfelelően.

1.4. Általános biztonsági utasítások



VESZÉLY

Ne üzemeltesse a készüléket, ha:

- sérült a készülék, a töltőállomás vagy a csatlakozókábel
 - sérült vagy törött a nyírófej, mert sérülhet a bőr
 - a készülék leesett, láthatóan sérült vagy működése korlátozott
 - a készülék úgy sérült, hogy szabadon vannak az elektromos részei
- Ilyenkor azonnal válassza le a készüléket a hálózatról!

A készüléket csak akkor használhatják gyermekek (8 éves kortól) és olyan személyek, akik nincsenek fizikai, érzékszervi vagy mentális képességeik teljes birtokában, illetve akik híján vannak a megfelelő tapasztalatnak és/vagy tudásnak, ha felügyelik őket vagy a készülék biztonságos használatát elmagyarázták nekik és tisztában vannak a kapcsolódó veszélyekkel. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást és felhasználói karbantartást gyermek felügyelet nélkül nem végezhet.

- gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről, hogy ne játszhassanak a készülékkel. Ügyeljen arra, hogy ne tartózkodjon gyermek a nyírófejnél. A készüléket úgy tárolja, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá.
- tartsa a csomagolóanyagot, például a fóliát, gyermekektől távol
- úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senkit se fenyegetsen botlásveszély és ne léphessen rá!
- védje a csatlakozókábelt a sérüléstől. Ne húzza a csatlakozókábelnél fogva. Akkor fogja meg a dugaszoló aljzatot, ha kihúzza ki az aljzattól. Tartsa távol a vezetéket forró felületektől. Ellenőrizze rendszeresen a csatlakozó vezeték épségét.
- ne tegye ki a készüléket hosszabb ideig 0 °C alatti vagy +40 °C feletti hőmérsékletnek. Kerülje a közvetlen napsugárzást.
- a veszély elkerülése érdekében javítást csak engedéllyel rendelkező személy végezhet.
- karbantartás és csere céljából húzza ki a készüléket az áramellátásból
- a nyírófejet nem szabad szétszerelni

1.5 Biztonság üzemelés közben



VESZÉLY

Bekapcsolt készülék esetén ne nyúljon a nyírófejbe, ill. a nyírófejhez.

A tökéletes működés érdekében a nyírófejet rendszeresen meg kell tisztítani és a megfelelő helyeken olajozni kell.

A készüléket ki kell kapcsolni, ha:

- leteszi a kezéből, pl. tölteni vagy ha rövid időre megszakítja a nyírást
- felteszi vagy leveszi a fésűt
- a készüléket tisztítani vagy olajozni kell

A nyírógépet csak eredeti tartozékokkal használja (töltőállomás, fésű stb.).

Ne próbálja hegyes tárggyal (pl. nyeles fésűvel) eltávolítani a port vagy idegen tárgyakat a készülék belsejéből.

2. Feltöltés

- a készülék kiszállításakor még nem üzemkész
- mielőtt a nyírógépet csatlakoztatja a konnektorra, ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség egyezik-e az adattáblán feltüntetett értékkel!
- az akkumulátor töltésszintjének fenntartása érdekében javasoljuk az akkumulátornak a motor leállásáig történő lemerítését
- 8 órával az első használat előtt tölts fel a készüléket, hogy aktiválódjon a mellékelt újratölthető elem
- ne töltsa a készüléket 0 °C alatti vagy 40 °C feletti hőmérsékleten
- ne töltsa a készüléket közvetlen napsugárzás vagy radiátorhő közelében
- a szokásos töltési idő 300 perc. Az akkumulátor károsodásának elkerülésére kerülje a hosszú töltési időket.
- a készülék teljes feltöltéssel több mint 90 percig használható. Töltés közben a piros jelzőfény világít.
- a nyírógép közvetlenül tölthető hálózatról vagy töltőállomásról és hálózatról.

3. Szállítási csomag és felépítés



1 Nyírógép

2 Fésű (3 mm)

3 Fésű (6 mm)

4 Fésű (9 mm)

5 Fésű (12 mm)

6 Tisztítókefe

7 Olaj

8 Tápegység


9 Töltőállomás

4. Kezelés, tisztítás, gondozás

Be- és kikapcsolás:

A készülék bekapcsolásához tolja előre a főkapcsolót. A készülék kikapcsolásához tolja hátra a főkapcsolót (1. ábra). A nyírógép kábellel és kábel nélkül is használható.

Csatlakoztassa az áramellátást az eszköz dugójára, amely a gép alsó részén található. Ezután csatlakoztassa a tápegységet az áramra (2. ábra). Alternatívaként a töltőállomás is használható tápegységgel (3. ábra).

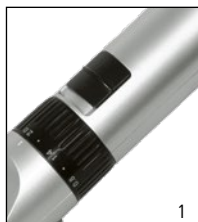

Vágómagasság állítás:

A nyírógép vágómagassága 5 fokozatban állítható (0,8 - 2,0 mm).
A vágómagasság az állítókerék forgatásával változtatható (4. ábra).



Fésűk használata:

A fésű rászorítása és eltávolítása során ellenőrizze, hogy a nyírógép ki van-e kapcsolva. Négy, 3, 6, 9, 12 mm-es fésű használható a különböző vágóhosszokhoz. Helyezze a fésűt a nyírófejre, és ellenőrizze, hogy oldalt bepattan-e.

A nyírógép megfelelő működésének és teljes teljesítményének használhatóságára rendszeresen tisztítsa és olajozza a készüléket.

A nyírófej tisztítása:

Rendszeres használat esetén a nyírófejet naponta alaposan meg kell tisztítani.

Kapcsolja ki a készüléket. Válassza le a készüléket az áramellátásról. Vegye le a fésűt és nyomja meg a vágókés közepét, hogy azt eltávolítsa (5. ábra). Távolítsa el a szőrt a tisztítóecsettel.

Helyezze a nyírófejet a gépre a 6. ábra szerint. Ellenőrizze, hogy a rögzítőszerszemet megfelelően van-e elhelyezve, és bepattanásig nyomja a nyírófejet a gépre.



A nyírófej olajkenése:

A nyírófej jó vágóteljesítményének lehető leghosszabb idejű megtartása érdekében a nyírófejet használat közben 15 percenként, a csapágyat pedig legjobb naponta megolajozni.

Vegye le a fésűt. A kéfével tisztítsa meg a vágóéleket, hogy eltávolítsa a szőrt az élek közül. Olajozza meg azokat a helyeket, ahová hozzáér a nyírófej teteje és alja. Ha a nyíróteljesítmény észrevehetően csökken vagy a nyírófej hőmérséklete túl magas, azonnal olajozzon. Ha a nyíróteljesítmény észrevehetően csökken vagy a nyírófej hőmérséklete túl magas, azonnal olajozzon. Ha a vágógépet nem használja, olajozza meg a nyírófejet naponta egyszer!

A nyírófej cseréje:

A nyírófej kopó alkatrész. A megfelelő gondozás ellenére is csökken a vágóteljesítménye. Ilyenkor cserélje ki a nyírófejet. A nyírófej pótalkatrész-ként külön rendelhető (cikkszám: 18181). A nyírófej cseréjekor ecsettel eltávolíthatók a szórmaradványok a belső részből. Nyomjon meg a vágókés közepét, hogy azt eltávolítsa (7. ábra). Helyezze az új nyírófejet a gépre a 8. ábra szerint. Ellenőrizze, hogy a rögzítőszerkezet megfelelően van-e elhelyezve, és bepattanásig nyomja a nyírófejet a gépre.

A készülék tisztítása:

Időnként törölje le a készüléket nedves ruhával, majd törölje szárazra.

5. Problémakezelés

Mit kell tenni, ha ...

- ... nem lehet bekapcsolni a készüléket?
- az akkumulátor lemerült? Csatlakoztassa a hálózati töltőt és töltse fel a nyírógépet
- száraz az nyírófej? A nyírófejet meg kell olajozni

... nem jár egyenletesen a nyírófej?

- a nyírófejet meg kell olajozni
- a felső és az alsó kés összeragadhat, ha hosszú ideig nem használja

... ha töltés közben nem világít a töltésjelző?

- ellenőrizze, hogy a tápegység megfelelően van-e csatlakoztatva

... ha a készülék magától kikapcsol?

- az akkumulátor lemerült. Töltse fel a nyírógépet

... ha nem tölthető többé az akkumulátor?

- az akkumulátor vagy a tápegység hibás! A tápegység utánrendelhető. Ha hibás az akkumulátor, a készüléket megfelelő módon le kell selejtezni

6. Műszaki adatok

	Nyírógép	Tápegység
Cikksz.	18180	18182
Motor fordulatszám	6900 ford./perc	-
Töltési idő	300 min	-
Vágási idő	90 min	-
Tömeg	212 g	277 g
Bemeneti feszültség	3 V DC	220-240 V
Frekvencia	-	50 Hz
Akkumulátorkapacitás	1200 mAh	-
Környezeti hőmérséklet Töltés/használat	0 °C - 40 °C	0 °C - 40 °C
Védelmi osztály	III.	II.
Skyddsklass	III	II

Elektromos hulladék

A készülék szakszerű eltávolítása a működőképesség megszűnése után az alkalmazó felelőssége alá tartozik. Vegye figyelembe országa vonatkozó előírásait. A készüléket tilos a házi hulladékkal eltávolítani. Az EK-irányvonalaknak megfelelően elektromos és elektronikai hulladékok eltávolításra vonatkozóan, a készülék a területi gyűjtőhelyeken ill. értékes anyagok gyűjtőhelyén ingyenesen átvételre kerül ill. olyan szakkereskedőkhöz, akik a visszavételt biztosítják, is elvihető. A megfelelő eltávolítás védi a környezetet és megelőzi személyek és a környezet esetleges károsodását.



CE jelölés / CE megfelelőségi nyilatkozat

Az Albert KERBL GmbH kijelenti, hogy az ebben az útmutatóban ismertetett termék/készülék megfelel az irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek. A CE jelölés igazolja az Európai Unió irányelveinek való megfelelést.

VETIS
Partner chovateľov

Obchody



VETIS Kráľovičové Kračany

Centrálny sklad a sídlo firmy
930 03 Kráľovičové Kračany 91
Tel.: 031/ 55 14 112

Mob: 0918/ 514 112

E-mail: vetis@vetis.sk